

Apresentação:

05730050000 - AVAGEL 20,5g
05730060000 - AVAGEL 410g

Composição

Alginato de Potássio, Sulfato de Cálcio, Tetrapirofosfato de Sódio, Fluotitanato de Potássio, Polietileno Glicol, Óxido de Magnésio, Diatomita, Aroma, Clorexidina, Álcool Anidro e Fenofaleína.

Indicações de Uso

Os componentes da família de ALGINATOS são indicados para moldagens totais ou parciais de bocas dentadas e desdentadas, em trabalhos de próteses totais ou parciais removíveis, na confecção de modelos de estudos para trabalhos de ortodontia, também é útil em moldagens para a confecção de restaurações unitárias e múltiplas, coroas e pontes fixas.

Entretanto, devido às peculiaridades de cada modelo, há técnicas de moldagem que são mais ou menos adequadas a cada modelo, como é mostrado abaixo:

AVAGEL – indicado para moldagens totais ou parciais de bocas dentadas e desdentadas, em trabalhos de próteses totais ou parciais removíveis, na confecção de modelos de estudos para trabalhos de ortodontia, também é útil em moldagens para a confecção de restaurações unitárias e múltiplas, coroas e pontes fixas.

Contraindicações

Os ALGINATOS não devem ser misturados ou usados em conjunto com outros alginatos, pois poderá alterar suas propriedades.

Advertências

Produto pode causar reação alérgica

Precauções

- Para Uso Odontológico
- Contém sílica, a inalação do pó seco pode ser prejudicial à saúde.
- Recomenda-se manipular com máscara de proteção facial.
- Recomenda-se que durante todos os procedimentos clínicos profissional, auxiliares assim como pacientes utilizem óculos de proteção
- As impressões devem ser sempre lavadas e desinfetadas, conforme recomendam a ADA, CDC e o OSHA.

Efeitos Adversos

Não se aplica.

Instruções Passo a Passo

MÉTODOS PARA ESPATULAR:

Fabricado por:

Dentsply Indústria e Comércio Ltda.
Rua José Francisco de Souza, 1926 – CEP 13633412 - Pirassununga-SP
CNPJ 31.116.239/0001-55 - Indústria Brasileira
www.dentsply.com.br – SAC: 0800 771 2226 (Somente no Brasil)
Responsável Técnico: Luiz Carlos Crepaldi – CRQ-SP: 04208396
Cadastro ANVISA nº 80196880224

Importado e Distribuído por:

Dentsply Argentina S.A.C.I. Gral. Enrique Martínez 657/661CP
1426BBI C.A.B.A. Dirección Técnica: María Verónica Ibarra MN
Nº 16837 - Autorizado por A.N.M.A.T. - PM Nº 1093-12
Dentsply Finance Co. Cra 19B Nº 84-47 - Bogotá – Colombia
Registro Sanitario INVIMA 2011DM-0008360

- Para uma moldagem de uma hemiarcada, utilizar uma medida de pó de 8,5g para uma medida de água de 18mL.
- Espatular o pó e a água até obter uma coloração rósea homogênea. •Inserir a moldeira com Avagel em sua devida posição na boca, comprimindo-a ligeiramente.
- Fazer as correções musculares e manter a moldeira imóvel até 1 minuto após o início da presa do material;
- Quando o material tiver retomado à coloração branca, remover e enxaguar com água corrente.
- Para se obterem melhores resultados, recomenda-se verter o gesso imediatamente após a moldagem. Não sendo isso possível, conservar o molde em um umidificador

Cuidados de Conservação

Conservar ao abrigo de calor e umidade.

Fabricado por:

Dentsply Indústria e Comércio Ltda.
Rua José Francisco de Souza, 1926 – CEP 13633412 - Pirassununga-SP
CNPJ 31.116.239/0001-55 - Indústria Brasileira
www.dentsply.com.br – SAC: 0800 771 2226 (Somente no Brasil)
Responsável Técnico: Luiz Carlos Crepaldi – CRQ-SP: 04208396
Cadastro ANVISA nº 80196880224

Importado e Distribuído por:

Dentsply Argentina S.A.C.I. Gral. Enrique Martínez 657/661CP
1426BBI C.A.B.A. Dirección Técnica: María Verónica Ibarra MN
Nº 16837 - Autorizado por A.N.M.A.T. - PM Nº 1093-12
Dentsply Finance Co. Cra 19B Nº 84-47 - Bogotá – Colombia
Registro Sanitario INVIMA 2011DM-0008360

Presentación:

05730050000 - AVAGEL 20,5g
05730060000 - AVAGEL 410g

Composición

Alginato de Potasio, Sulfato de Calcio, Tetrapirofosfato de Sodio, Fluotitanato de Potasio, Polietilenglicol, Óxido de Magnesio, Diatomita, Aroma, Clorhexidina, Alcohol Anhidro y Fenoltaleína.

Indicaciones de uso

Los componentes de la familia de ALGINATOS son indicados para moldes totales o parciales de bocas dentadas y desdentadas, en trabajos de prótesis totales o parciales removibles, en la confección de modelos de estudios para trabajos de ortodoncia, también es útil en moldes para la confección de restauraciones unitarias y múltiples, coronas y puentes fijos.

Sin embargo, debido a las peculiaridades de cada modelo, hay técnicas de moldeo que son más o menos adecuadas a cada modelo, como se muestra a continuación:

AVAGEL - indicado para moldes totales o parciales de bocas dentadas y desdentadas, en trabajos de prótesis totales o parciales removibles, en la confección de modelos de estudios para trabajos de ortodoncia, también es útil en moldes para la confección de restauraciones unitarias y múltiples, coronas y puentes fijos.

Contra indicaciones

Los ALGINATOS no deben mezclarse o utilizarse junto con otros alginatos, ya que pueden cambiar sus propiedades.

Advertencias

El producto puede causar una reacción alérgica

Precauciones

- Para uso odontológico
- Contiene sílice, la inhalación del polvo seco puede ser perjudicial para la salud.
- Se recomienda manipular con máscara de protección facial.
- Se recomienda que durante todos los procedimientos clínicos profesionales, auxiliares así como pacientes utilicen gafas de protección
- Las impresiones siempre deben lavarse y desinfectarse, según lo recomendado por ADA, CDC y OSHA.

Efectos adversarios

No se aplican.

Instrucciones paso a paso

MÉTODOS PARA ESPATULAR:

Fabricado por:

Dentsply Indústria e Comércio Ltda.
Rua José Francisco de Souza, 1926 – CEP 13633412 - Pirassununga-SP
CNPJ 31.116.239/0001-55 - Indústria Brasileira
www.dentsply.com.br – SAC: 0800 771 2226 (Somente no Brasil)
Responsável Técnico: Luiz Carlos Crepaldi – CRQ-SP: 04208396
Cadastro ANVISA nº 80196880224

Importado e Distribuido por:

Dentsply Argentina S.A.C.I. Gral. Enrique Martínez 657/661CP
1426BBI C.A.B.A. Dirección Técnica: María Verónica Ibarra MN
Nº 16837 - Autorizado por A.N.M.A.T. - PM Nº 1093-12
Dentsply Finance Co. Cra 19B Nº 84-47 - Bogotá – Colombia
Registro Sanitario INVIMA 2011DM-0008360

- Para un moldeado de una hemiarcada, utilizar una medida de polvo de 8,5 g para una medida de agua de 18mL.
- Pasar la espátula en el polvo y en la agua para obtener una coloración rósea homogénea. • Insertar la bandeja con Avagel en su posición correcta en la boca, presionando ligeramente.
- Haciendo parches musculares y mantener la bandeja todavía hasta 1 minuto después del inicio de la presa del material;
- Cuando el material se haya reanudado a la coloración blanca, retirar y enjuagar con agua corriente.
- Para obtener mejores resultados, se recomienda verter el yeso inmediatamente después del moldeo. No es posible, conservar el molde en un humidificador.

Cuidados de Conservación

Conservar al abrigo de calor y humedad.

Fabricado por:

Dentsply Indústria e Comércio Ltda.
Rua José Francisco de Souza, 1926 – CEP 13633412 - Pirassununga-SP
CNPJ 31.116.239/0001-55 - Indústria Brasileira
www.dentsply.com.br – SAC: 0800 771 2226 (Somente no Brasil)
Responsável Técnico: Luiz Carlos Crepaldi – CRQ-SP: 04208396
Cadastro ANVISA nº 80196880224

Importado e Distribuido por:

Dentsply Argentina S.A.C.I. Gral. Enrique Martínez 657/661CP
1426BBI C.A.B.A. Dirección Técnica: Maria Veronica Ibarra MN
Nº 16837 - Autorizado por A.N.M.A.T. - PM Nº 1093-12
Dentsply Finance Co. Cra 19B Nº 84-47 - Bogotá – Colombia
Registro Sanitario INVIMA 2011DM-0008360