

ENHANCE™**Material de Acabamento e Polimento****POGO™****Sistema de Polimento Diamantado****Descrição**

As Pontas de Acabamento Enhance e as Pontas de Polimento Diamantadas PoGo foram desenvolvidas para serem utilizadas no acabamento e polimento de restaurações e facetas Veneer confeccionadas com compósito restaurador do tipo Micro-matriz, micro-híbrido, Híbrido, Microfil ou Compômeros Restauradores, produzindo uma superfície lisa e de alto brilho.

Apresentação**Enhance Sistema de Acabamento.**

Caixas contendo 7 Pontas Sortidas
Caixas contendo 7 Pontas em Disco
Caixas contendo 7 Pontas em Taça
Caixas contendo 7 Pontas em Chama de Vela

PoGo Sistema de Polimento

Caixas contendo 3 Pontas Sortidas

Enhance / PoGo

Caixas contendo 5 Pontas Enhance e 2 PoGo em Disco
Caixas contendo 5 Pontas Enhance e 2 PoGo em Taça
Caixas contendo 5 Pontas Enhance e 2 PoGo em Chama de Vela

Composição

Pontas Enhance: Tripolímero (Estireno-Butadieno-Metacrilato de Metila), Sílica Pirolítica Silanizada, Uretano Dimetacrilato, Canforoquinona, N-Metil Dietanolamina e Óxido de Alumínio.

Pontas PoGo: Pó de Diamante, 3-(Trimetoxisilil), Propil Metacrilato, Sílica, Dimetacrilato de Uretano, N,N-Dihidroxietil-p-Toluidina, Peróxido de Benzoila, Butil Hidroxi Tolueno (BHT).

Indicações de Uso

As Pontas de acabamento Enhance são indicadas para a realização do acabamento e alisamento superficial das restaurações realizadas em resinas compósitas e compômeros restauradores, permitindo que superfícies corretamente polidas e brilhantes possam ser facilmente obtidas pelo uso das pontas de polimento do Sistema PoGo.

Cuidados e Precauções

Assim como qualquer instrumento rotatório, o contato prolongado das Pontas Enhance ou das Pontas PoGo com as superfícies das restaurações provocam um aumento de temperatura, que pode causar danos tanto à restauração como à vitalidade dental. Recomenda-se, portanto, o uso intermitente com pressão leve ou moderada sempre em velocidade baixa ou moderada.

Evitar o uso de altas velocidades ou o uso dos bordos das pontas, pois isso poderá causar o desprendimento das partes ativas das pontas dos respectivos mandris ou ainda causar um desgaste prematuro e redução da sua eficiência.

Modo de Usar**TÉCNICA DE UTILIZAÇÃO:****PONTAS ENHANCE DE ACABAMENTO.**

- Após o término das restaurações e/ou facetas Veneer com compósito, realizar a remoção dos excessos mais grosseiros com o auxílio de um disco de lixa ou ainda com o uso de brocas multilaminadas.

- Adaptar o mandril com as pontas de acabamento do Sistema Enhance a um contra-ângulo de baixa velocidade e prosseguir o acabamento da superfície da restauração e/ou faceta Veneer.

Dica Técnica:

A abrasividade das pontas de acabamento do Sistema Enhance pode ser controlada através da pressão aplicada à superfície do compósito. Uma forte pressão removerá grandes porções do material restaurador; uma leve pressão removerá pequenas porções do material e produzirá uma superfície mais lisa, facilitando o posterior polimento final.

PONTAS DO SISTEMA PoGo

- Adaptar o mandril com as pontas de polimento do sistema PoGo a um contra-ângulo de baixa velocidade convencional. **NUNCA UTILIZAR AS PONTAS PoGo EM PEÇAS DE MÃO DE ALTA VELOCIDADE.**

- Começar o acabamento realizando uma pequena pressão sobre a superfície da restauração com uma velocidade moderada. Para obter uma superfície altamente brilhante, reduza a pressão aplicada e realize pequenos movimentos de polimento.

Dica técnica:

A flexibilidade das pontas PoGo permitem que os ângulos das restaurações possam ser polidos sem que sua forma seja modificada.

Cuidados de Conservação

Armazenar as pontas do Sistema Enhance e do Sistema PoGo ao abrigo da luz solar, a temperaturas entre 18°C e 25°C e a uma umidade relativa de 50% - 20%.

Prazo de Validade:

3 anos

Uso Único. Uso Profissional.

Fabricado por/Hecho por:

DENTSPLY Indústria e Comércio Ltda.
Rua Alice Hevê, 86 – CEP 25665-010 - Petrópolis-RJ
CNPJ 31.116.239/0001-55 - Indústria Brasileira
www.dentsply.com.br – SAC: 0800 721 1200
Responsável Técnico: Marcelle Cortezia – CRF/RJ nº 7999
Registros ANVISA nº 10186370131 (Enhance - Material de Acabamento e Polimento) / 80196880193 (Pogo – Material de Acabamento e Polimento)
06.21.209-0000 Rev.: 07

Importado y Distribuido por:

DENTSPLY Argentina S.A.C.I. Gral. Enrique Martínez 657/661
CP 1426BBI C.A.B.A. Dirección Técnica: Nora Canoura MN Nº: 2800
Autorizado por A.N.M.A.T. - PM Nº 1093-37

Dentsply Chile Comercial Ltda.
Miguel Claro 285 - Providencia - Santiago – Chile

Dentsply Finance Co. - Carrera 19B nº 84-47, Bogotá - D.C. Registro Sanitario INVIMA 2007DM-0000922

ENHANCE™

Material de Acabamento e Polimento

POGO™

Sistema de Polimento Diamantado

ENHANCE™ - Sistema de Acabado

POGO™ - Sistema de Pulimento Diamantado

Descripción

Las Puntas de Acabado Enhance y las Puntas de Pulimento Diamantadas PoGo fueron desarrolladas para ser usadas en el acabado y pulimento de restauraciones y facetas Veneer confeccionadas con compósito restaurador del tipo Micro-matriz, Micro-híbrido, Híbrido, Microfil o Compómeros Restauradores, produciendo una superficie lisa y de alto brillo.

Presentación

Enhance Sistema de Acabado.

- Cajas conteniendo 7 Puntas Surtidas
- Cajas conteniendo 7 Puntas en Disco
- Cajas conteniendo 7 Puntas en Taza
- Cajas conteniendo 7 Puntas en Llama de Vela

PoGo Sistema de Pulimento

- Cajas conteniendo 3 Puntas Surtidas

Enhance / PoGo

- Cajas conteniendo 5 Puntas Enhance y 2 PoGo en Disco
- Cajas conteniendo 5 Puntas Enhance y 2 PoGo en Taza
- Cajas conteniendo 5 Puntas Enhance y 2 PoGo en Llama de Vela.

Composición

Puntas Enhance: Tripolímero (Estireno-Butadieno-Metacrilato de Metila), Sílice Piroclítica Silanizada, Uretano Dimetacrilato, Canforoquinona, N-Metil Dietanolamina y Óxido de Aluminio.

Puntas PoGo: Polvo de Diamante, 3-(Trimetoxisilil), Propil Metacrilato, Silicona, Dimetacrilato de Uretano, N,N-Dihidroxietil-p-Toluidina, Peróxido de Benzoila, Butil Hidroxi Tolueno (BHT).

Indicaciones del uso

Las Puntas de acabado Enhance son indicadas para la realización del acabado y alisamiento superficial de las restauraciones realizadas con resinas compósitos y compómeros restauradores, haciendo que las superficies correctamente pulidas y brillantes puedan ser fácilmente obtenidas por el uso de las puntas de pulimento del Sistema PoGo.

Cuidados y Precauciones

Así como cualquier instrumento rotatorio, el contacto prolongado de las Puntas Enhance o de las Puntas PoGo con las superficies de las restauraciones provoca un aumento de la temperatura, que puede causar daños tanto

a la restauración así como la vitalidad dental. Recomendase, por lo tanto, el uso intermitente de presión liviana o moderada siempre a una velocidad baja o moderada.

Evitar el uso a altas velocidades o el uso de los bordes de las puntas, porque eso puede causar el desprendimiento de las partes activas de las puntas de los respectivos mandriles o puede causar un desgaste precoz y disminución de su eficiencia.

Modo de Usar

TÉCNICA DE USO:

PUNTAS ENHANCE DE ACABADO.

- Después del término de las restauraciones y/o facetas Veneer con el compósito, hacer la remoción de los excesos más groseros con la ayuda de un disco de lija o haciendo el uso de brocas múltiples laminadas.

- Adaptar el mandril con las puntas de acabado del Sistema Enhance para un contra ángulo de baja velocidad y luego seguir el acabado de la superficie de la restauración y/o faceta Veneer.

Sugerencia Técnica:

La abrasión de las puntas de acabado del Sistema Enhance puede ser controlada a través de la presión aplicada a la superficie del compósito. Una fuerte presión retirará las grandes porciones del material restaurador; una liviana presión removerá pequeñas porciones del material y producirá una superficie más lisa, facilitando su posterior pulimento final.

PUNTAS DEL SISTEMA PoGo

- Adaptar el mandril con las puntas de pulimento del sistema PoGo a un contra ángulo de baja velocidad convencional. **NO UAR LAS PUNTAS PoGo EN PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD.**

- Realizar el acabado haciendo una pequeña presión sobre la superficie de restauración a una velocidad moderada. Para obtener una superficie altamente brillante, reduzca la presión aplicada y haga pequeños movimientos de pulimento.

Sugerencia técnica:

La flexibilidad de las puntas PoGo permiten que los ángulos de las restauraciones puedan ser pulidos sin que su forma sea modificada.

Cuidados de Conservación

Almacenar las puntas del Sistema Enhance y del Sistema PoGo a temperaturas entre 18°C y 25°C y a una humedad relativa de 50% +/- 20%. Evite de exponerlas a la luz solar.

Plazo de validez:

3 años

Un solo uso. Uso Profesional.

Fabricado por/Hecho por:

DENTSPLY Indústria e Comércio Ltda.
Rua Alice Hevê, 86 – CEP 25665-010 - Petrópolis-RJ
CNPJ 31.116.239/0001-55 - Indústria Brasileira
www.dentsply.com.br – SAC: 0800 721 1200
Responsável Técnico: Marcelle Cortezia – CRF/RJ nº 7999
Registros ANVISA nº 10186370131 (Enhance - Material de Acabamento e Polimento) / 80196880193 (Pogo – Material de Acabamento e Polimento)
06.21.209-0000 Rev.: 07

Importado y Distribuido por:

DENTSPLY Argentina S.A.C.I. Gral. Enrique Martínez 657/661
CP 1426BBI C.A.B.A. Dirección Técnica: Nora Canoura MN Nº: 2800
Autorizado por A.N.M.A.T.- PM Nº 1093-37

Dentsply Chile Comercial Ltda.
Miguel Claro 285 - Providencia - Santiago – Chile

Dentsply Finance Co. - Carrera 19B nº 84-47, Bogotá - D.C. Registro Sanitario INVIMA 2007DM-0000922