

### Apresentação

O sistema Enhance foi desenvolvido para ser utilizado no acabamento e polimento de restaurações e facetas realizadas com compósitos híbridos, assim como compósitos do tipo microfill, produzindo uma superfície lisa e fácil de ser polida até a obtenção de um alto brilho da mesma.

Apresentado em:

06135500000 - 7 unidades de Enhance pontas sortidas (02 discos, 02 taças e 03 chamas de vela);  
06135510000 - 7 unidades de Enhance pontas em taça;  
06135520000 - 7 unidades de Enhance pontas em chama de vela;  
06135530000 - 7 unidades de Enhance pontas em disco;  
06135560000 - 2 unidades de Enhance pontas sortidas (01 taça e 01 chama de vela);  
06135720000 - 5 unidades de Enhance pontas em chama de vela e 2 unidades de Pogo pontas em chama de vela;  
06135750000 - 5 unidades de Enhance pontas sortidas (02 discos e 03 chamas de vela) e 2 unidades de Pogo sortido (01 disco e 01 chama de vela).

### Composição

Tripolímero (Estireno-Butadieno-Metacrilato de Metila), Sílica Piroclítica Silanizada, Uretano Dimetacrilato, Canforoquinona, N-Metil Dietanolamina e Óxido de Alumínio.

### Indicações de Uso

As pontas Enhance são indicadas para a realização do acabamento e polimento superficial das restaurações realizadas em resinas compostas e compômeros restauradores, permitindo que superfícies corretamente polidas e brilhantes possam ser facilmente obtidas.

### Contraindicações

Não se aplica.

### Advertências e Precauções

Assim como qualquer instrumento rotatório, o contato prolongado provocará um aumento de temperatura, podendo causar danos à restauração e à vitalidade dental. Recomenda-se, portanto, o uso intermitente com pressão leve ou moderada.

### Efeitos Adversos

Não se aplica.

### Instruções Passo a Passo

Após o término das restaurações e/ou facetas com compósito, realize a remoção dos excessos mais grosseiros com o auxílio de um disco de lixa ou ainda com o uso de brocas multilaminadas. Adapte o mandril com as pontas de acabamento do sistema Enhance a um contra ângulo de baixa velocidade e prossiga o acabamento da superfície da restauração e/ou faceta. A abrasividade das pontas do sistema Enhance poderá ser controlada através da pressão aplicada à superfície do compósito. Uma forte pressão removerá grandes porções do material restaurador; uma leve pressão removerá pequenas porções do material e produzirá uma superfície mais lisa, facilitando o posterior polimento final.

### Cuidados de Conservação

Conservar em local seco e fresco.

Nº do Lote: Vide Rótulo.

Prazo de Validade: 3 anos.

O fabricante recomenda uso único.

Uso Profissional.

### Dentsply Indústria e Comércio Ltda.

Rua José Francisco de Souza, 1926 - Distrito Industrial,  
Pirassununga - SP - Cep: 13633-412 - CNPJ: 31.116.239/0001-55  
Inscrição Estadual: 536.087.129.119 - www.dentsply.com.br  
SAC: 0800 771 2226 (Somente no Brasil)  
Cadastro ANVISA: 10186370131 - Responsável Técnico: Luiz  
Carlos Crepaldi - CRQ-SP: 04208396 - Indústria Brasileira

Importado y Distribuido por:

Dentsply Argentina S.A.C.I. Gral. Enrique Martínez 657/661  
CP 1426BBI C.A.B.A. Dirección Técnica: María Verónica Ibarra M.N Nº 16.837  
Autorizado por A.N.M.A.T. - PM Nº 1093-36  
Dentsply Chile Comercial Ltda.  
Valenzuela Castillo 1063 - Providencia - Santiago - Chile  
Dentsply Finance Co. - Carrera 19B nº 84-47, Bogotá - D.C. Registro  
Sanitario INVIMA 2017DM-0016516

### Presentación

El sistema Enhance fue desarrollado para ser utilizado en el acabado de restauraciones y carillas Veneers realizadas con composites híbridos, así como con composites de micropartícula, logrando una superficie lisa y fácil de ser pulida hasta obtener un buen brillo.

Presentado en:

Caja con 7 Puntas surtidas

Caja con 7 Puntas en Disco

Caja con 7 Puntas en Taza

Caja con 7 Puntas en Llama de Vela

### Composición

Tripolímero (Estireno, Butadieno Metacrilato de Metilo), Silica pirolítica silanizada, Uretano Dimetacrilato, Canforquinona, N-Metil Dietanolamina y Oxido de Aluminio.

### Indicaciones del uso

Las Puntas de acabado Enhance son indicadas para la realización del acabado y alisamiento superficial de las restauraciones realizadas con resinas compósitos y compómeros restauradores, haciendo que las superficies correctamente pulidas y brillantes puedan ser fácilmente obtenidas.

### Contraindicaciones

No se aplica.

### Advertencias y Precauciones

Assim como qualquer instrumento rotatório, o contato prolongado provocará um aumento de temperatura, podendo causar danos à restauração e à vitalidade dental. Recomenda-se, portanto, o uso intermitente com pressão leve ou moderada. Evitar el uso a altas velocidades o el uso de los bordes de las puntas, porque eso puede causar el desprendimiento de las partes activas de las puntas de los respectivos mandriles o puede causar un desgaste precoz y disminución de su eficiencia.

### Efectos Adversos

No se aplica.

### Instrucciones paso a paso

Después del término de las restauraciones y/o facetas con el compósito, hacer la remoción de los excesos más groseros con la ayuda de un disco de lija o haciendo el uso de brocas múltiples laminadas. Adaptar el mandril con las puntas de acabado del Sistema Enhance para un contra ángulo de baja velocidad y luego seguir el acabado de la superficie de la restauración y/o faceta. La abrasión de las puntas de acabado del Sistema Enhance puede ser controlada a través de la presión aplicada a la superficie del compósito. Una fuerte presión retirará las grandes porciones del material restaurador; una liviana presión removerá pequeñas porciones del material y producirá una superficie más lisa, facilitando su posterior pulimento final.

### Cuidados de Conservación

Almacenar en lugar seco y fresco.

Nº Lote: Ver Rótulo.

Plazo de Validez: 3 años.

El fabricante recomienda único uso.

Uso profesional.

### Dentsply Indústria e Comércio Ltda.

Rua José Francisco de Souza, 1926 - Distrito Industrial,  
Pirassununga - SP - Cep: 13633-412 - CNPJ: 31.116.239/0001-55  
Inscrição Estadual: 536.087.129.119 - www.dentsply.com.br  
SAC: 0800 771 2226 (Somente no Brasil)  
Cadastro ANVISA: 10186370131 - Responsável Técnico: Luiz  
Carlos Crepaldi - CRQ-SP: 04208396 - Indústria Brasileira

Importado y Distribuido por:

Dentsply Argentina S.A.C.I. Gral. Enrique Martínez 657/661  
CP 1426BBI C.A.B.A. Dirección Técnica: María Verónica Ibarra M.N Nº 16.837  
Autorizado por A.N.M.A.T. - PM Nº 1093-36  
Dentsply Chile Comercial Ltda.  
Valenzuela Castillo 1063 - Providencia - Santiago - Chile  
Dentsply Finance Co. - Carrera 19B nº 84-47, Bogotá - D.C. Registro  
Sanitario INVIMA 2017DM-0016516