

Apresentação

As limas Flexicut® são fornecidas em blisters plásticos com 6 unidades de limas de aço inoxidável, estéreis.

Flexicut®

- V04 0364 021 015: 6 unidades de limas tamanho ISO 15 de 21mm;
- V04 0364 021 020: 6 unidades de limas tamanho ISO 20 de 21mm;
- V04 0364 021 025: 6 unidades de limas tamanho ISO 25 de 21mm;
- V04 0364 021 030: 6 unidades de limas tamanho ISO 30 de 21mm;
- V04 0364 021 035: 6 unidades de limas tamanho ISO 35 de 21mm;
- V04 0364 021 040: 6 unidades de limas tamanho ISO 40 de 21mm;
- V04 0364 021 230: 6 unidades de limas tamanhos ISO 15-40 de 21mm;
- V04 0364 025 015: 6 unidades de limas tamanho ISO 15 de 25mm;
- V04 0364 025 020: 6 unidades de limas tamanho ISO 20 de 25mm;
- V04 0364 025 025: 6 unidades de limas tamanho ISO 25 de 25mm;
- V04 0364 025 030: 6 unidades de limas tamanho ISO 30 de 25mm;
- V04 0364 025 035: 6 unidades de limas tamanho ISO 35 de 25mm;
- V04 0364 025 040: 6 unidades de limas tamanho ISO 40 de 25mm;
- V04 0364 025 230: 6 unidades de limas tamanhos ISO 15-40 de 25mm.

Composição

A lima Flexicut® foi projetada com uma parte ativa de aço inoxidável DIN 1.4310, um stop de silicone (como suporte visual para manter o comprimento de trabalho) e um cabo feito de polieterimida na parte superior do instrumento.

Indicações de Uso

A lima Flexicut® é indicada para utilização em tratamentos endodônticos convencionais de canais radiculares. É utilizada para moldar o canal radicular em movimento de limagem (no máximo 45° no sentido horário) com uma habilidade de corte moderada. Devido à técnica de "Força Balanceada" recomendada, o alargamento seguro preserva a forma natural do canal. Este instrumento deve ser utilizado apenas por dentistas treinados.

Contraindicações

Não aplicável.

Advertências

As limas são instrumentos exclusivos de uso odontológico e não devem ser utilizadas para outros fins.

Precauções

As limas são fornecidas estéreis, mas podem ser reutilizadas (no máximo 8 vezes), devendo-se garantir que apenas procedimentos validados e equipamentos calibrados e submetidos regularmente à manutenção sejam utilizados na limpeza/desinfecção e esterilização das limas, a cada uso. Os procedimentos de limpeza e desinfecção são pré-requisitos essenciais para uma efetiva esterilização.

Efeitos Adversos

Não se aplica.

Instruções Passo a Passo

A lima Flexicut® é utilizada para preparar um canal radicular severamente curvado e estreito com um movimento de preenchimento. A lima deve limpar o canal radicular e colocá-lo em uma forma cônica, o que permite um preenchimento estreito do canal radicular. A seção transversal produzida durante a moagem tem uma forma de um triângulo equilátero. As arestas de corte das limas Flexicut® fornecem um movimento rotativo de raspagem para moldar o canal radicular.

Cuidados de Conservação

A lima Flexicut® deve ser armazenada em temperatura entre 0°-30°C, umidade relativa entre 50-60% e ao abrigo de radiação solar.

Lote: Vide Rótulo do Produto

Prazo de Validade: 05 anos

VDW GmbH

Bayerwaldstr. 15, D-81737, Munique
Alemanha

Registrado por:

DENTSPLY Indústria e Comércio Ltda.
Rua José Francisco de Souza, 1926 - CEP 13633412 - Pirassununga-SP
CNPJ 31.116.239/0001-55 - Indústria Brasileira
www.dentsply.com.br - SAC: 0800 771 2226 (Somente no Brasil)
Responsável Técnico: Luiz Carlos Crepaldi - CRQ-SP: 04208396
Registros ANVISA nº 80196880340