

DENTSPLY

GENGI-RET

Fio para Retração Gengival

Gengi-ret é um fio para retração gengival sem epinefrina, á base de cloreto de alumínio, não apresentando portanto qualquer restrição para seu uso.

Gengi-ret promove uma retração gengival rápida, ativado pelos fluídos bucais.

Gengi-ret é confeccionado em fio de algodão duplo, o que permite que seja desfiado quando se deseje uma espessura menor.

COMPOSIÇÃO:

Algodão, Cloreto de Alumínio, Lidocaina, Hidroxiquinoleina, Nipagin e Nipazol.

TÉCNICA DE APLICAÇÃO:

1- Envolver o colo do dente com o fio com ligeiro excesso à altura da gengiva. Cortar as pontas se necessário.

2- Com um instrumento apropriado, empurrar o fio sob a gengiva. Aguardar 2 a 3 minutos.

3- Remover o fio. A margem gengival estará claramente definitiva, proporcionando a condição ideal para uma moldagem adequada.

PRECAUÇÕES:

1- Evitar contato prolongado com a mucosa oral. Ocorrendo irritação da mucosa, irrigar o local com abundante soro fisiológico.

2- Manter o produto fechado e em local seco.

PRAZO DE VALIDADE:

3 anos

APRESENTAÇÃO:

Fio para Retração Gengival com 1,5m nas versões: Fine ou Medium.

USO PROFISSIONAL

DENTSPLY Indústria e Comércio Ltda. - Rua Alice Hervê, 86 - CEP 25665-010
Petrópolis RJ - CNPJ 31.116.239/0001-55 - www.dentsply.com.br
Central de Relacionamento: 0800 721 1200 - Registro ANVISA nº 10186370152
Resp. Técnico: Marcelle Cortezia - CRF-RJ Nº 7999 - Indústria Brasileira

Importado y Distribuido en Latino América por:
DENTSPLY Argentina S.A.C.I. Gral. Enrique Martínez 657/661
CP 1426BBI Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Dirección Técnica: Nora Canoura - Autorizado por A.N.M.A.T.- PM Nº 1093-75

Dentsply Chile Comercial Ltda.
Miguel Claro 285 - Providencia - Santiago - Chile
Dentsply Finance Co. - Carrera 21 N° 84-47 - Bogotá, D.C.

16 71 006 0000 - Rev. 03



DENTSPLY

GENGI-RET

Hilo para Retracción de Encías

Gengi-ret es un hilo para retracción de encías sin epinefrina, a base de clorato de aluminio, que no presenta restricciones para su uso.

Gengi-ret promueve una retracción rápida de encías, activada por los fluidos bucales.

Gengi-ret está confeccionado en hilo de algodón doble, lo que permite que sea deshilado en el caso de desearse una espesura menor.

COMPOSICIÓN:

Algodón, Cloreto de Aluminio, Lidocaina, Hidroxiquinoleina, Nipagin y Nipazol.

TÉCNICA DE APLICACIÓN:

Envolver el cuello del diente con el hilo, con un poco de exceso a la altura de la encía. Cortar las puntas en el caso de que sea necesario.

Con un instrumento apropiado, empujar el hilo hacia el surco gingival. Esperar de 2 a 3 minutos.

Remover el hilo. El margen de la encía estará claramente definido, proporcionando la condición ideal para un modelado adecuado.

PRECAUCIONES:

Evitar contacto prolongado con la mucosa oral. En el caso de ocurrir irritación de la mucosa, irrigar el local con abundante suero fisiológico.

Mantener el producto cerrado y en local seco.

PRAZO DE VALIDEZ:

3 años

PRESENTACIÓN:

Hilo para Retracción de Encías con 1,5m en presentaciones Fine y Medium.

USO PROFESIONAL

DENTSPLY Indústria e Comércio Ltda. - Rua Alice Hervê, 86 - CEP 25665-010
Petrópolis RJ - CNPJ 31.116.239/0001-55 - www.dentsply.com.br
Central de Relacionamento: 0800 721 1200 - Registro ANVISA nº 10186370152
Resp. Técnico: Marcelle Cortezia - CRF-RJ Nº 7999 - Indústria Brasileira

Importado y Distribuido en Latino América por:
DENTSPLY Argentina S.A.C.I. Gral. Enrique Martínez 657/661
CP 1426BBI Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Dirección Técnica: Nora Canoura - Autorizado por A.N.M.A.T.- PM Nº 1093-75

Dentsply Chile Comercial Ltda.
Miguel Claro 285 - Providencia - Santiago - Chile
Dentsply Finance Co. - Carrera 21 N° 84-47 - Bogotá, D.C.

16 71 006 0000 - Rev. 03

