

Conform Fit Gutta-Percha Points Waveone Gold Endodontics Files

Gutta-Percha

Instruções de Uso

Apresentação

Cada modelo comercial é apresentado em embalagens primária e secundária, contendo 60 unidades cada. Além disso, os modelos comerciais são codificados por cores para clara identificação, conforme segue:

Conform fit Gutta-Percha Points WaveOne Gold Endodontics files - A175X00000S00: amarelo
Conform fit Gutta-Percha Points WaveOne Gold Endodontics files - A175X00000P00: vermelho
Conform fit Gutta-Percha Points WaveOne Gold Endodontics files - A175X00000M00: verde
Conform fit Gutta-Percha Points WaveOne Gold Endodontics files - A175X00000L00: branco

Embalagem Primária: caixa de plástico de polietileno articulada com etiquetas de papel e sobrecarga de celofane.

Embalagem Secundária: caixa de papelão com uma etiqueta de papel. A vedação desta embalagem é feita por fita adesiva ou cola quente.

Composição

Óxido de Zinco; Gutta-Percha; Sulfato de Bário; Agentes de coloração; Inert Fillers; Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionate.

Indicações de Uso

A gutta-percha é utilizada para o preenchimento dos canais radiculares durante o tratamento endodôntico.

Contraindicações

Não se aplica.

Advertências

Não se aplica.

Precauções

Apenas para uso sob prescrição.

Somente para uso odontológico.

Não deve ser esterilizado.

Efeitos Adversos

Nenhuma reação adversa foi relatada até momento.

Instruções Passo a Passo

1. Aquecer a Conform fit Gutta-Percha Points WaveOne Gold Endodontics files uniformemente, girando-o acima de uma chama suave, evitando o contato direto.
2. Quando estiver suficientemente plastificado inserir no interior da cavidade com um instrumento frio, adaptando o material às paredes do preparo.
3. Evitar superaquecer o material para que não se tornem pegajosos. A plasticidade necessária ao trabalho é atingida à temperatura de 60°C. Para facilitar a remoção do interior da cavidade, usar um instrumento ligeiramente aquecido.

Cuidados de Conservação

- Temperatura: armazene abaixo de 30 °C
- Umidade: armazene em um lugar seco fresco
- Luz: Mantenha-o fora da incidência de luz direta.