

### Apresentação

As limas Hedstroem® são fornecidas em blisters plásticos com 6 unidades de limas de aço inoxidável, estéreis.

Hedstroem®

- V04 0373 021 008: 6 unidades de limas tamanho ISO 08 de 21mm;
- V04 0373 021 010: 6 unidades de limas tamanho ISO 10 de 21mm;
- V04 0373 021 220: 6 unidades de limas tamanhos ISO 08-10 de 21mm;
- V04 0373 021 015: 6 unidades de limas tamanho ISO 15 de 21mm;
- V04 0373 021 020: 6 unidades de limas tamanho ISO 20 de 21mm;
- V04 0373 021 025: 6 unidades de limas tamanho ISO 25 de 21mm;
- V04 0373 021 030: 6 unidades de limas tamanho ISO 30 de 21mm;
- V04 0373 021 035: 6 unidades de limas tamanho ISO 35 de 21mm;
- V04 0373 021 040: 6 unidades de limas tamanho ISO 40 de 21mm;
- V04 0373 021 230: 6 unidades de limas tamanhos ISO 15-40 de 21mm;
- V04 0373 021 045: 6 unidades de limas tamanho ISO 45 de 21mm;
- V04 0373 021 050: 6 unidades de limas tamanho ISO 50 de 21mm;
- V04 0373 021 055: 6 unidades de limas tamanho ISO 55 de 21mm;
- V04 0373 021 060: 6 unidades de limas tamanho ISO 60 de 21mm;
- V04 0373 021 070: 6 unidades de limas tamanho ISO 70 de 21mm;
- V04 0373 021 080: 6 unidades de limas tamanho ISO 80 de 21mm;
- V04 0373 021 240: 6 unidades de limas tamanhos ISO 45-80 de 21mm;
- V04 0373 021 090: 6 unidades de limas tamanho ISO 90 de 21mm;
- V04 0373 021 100: 6 unidades de limas tamanho ISO 100 de 21mm;
- V04 0373 021 110: 6 unidades de limas tamanho ISO 110 de 21mm;
- V04 0373 021 250: 6 unidades de limas tamanhos ISO 90-110 de 21mm;
- V04 0373 025 008: 6 unidades de limas tamanho ISO 08 de 25mm;
- V04 0373 025 010: 6 unidades de limas tamanho ISO 10 de 25mm;
- V04 0373 025 220: 6 unidades de limas tamanhos ISO 08-10 de 25mm;
- V04 0373 025 015: 6 unidades de limas tamanho ISO 15 de 25mm;
- V04 0373 025 020: 6 unidades de limas tamanho ISO 20 de 25mm;
- V04 0373 025 025: 6 unidades de limas tamanho ISO 25 de 25mm;
- V04 0373 025 030: 6 unidades de limas tamanho ISO 30 de 25mm;
- V04 0373 025 035: 6 unidades de limas tamanho ISO 35 de 25mm;
- V04 0373 025 040: 6 unidades de limas tamanho ISO 40 de 25mm;
- V04 0373 025 230: 6 unidades de limas tamanhos ISO 15-40 de 25mm;
- V04 0373 025 045: 6 unidades de limas tamanho ISO 45 de 25mm;
- V04 0373 025 050: 6 unidades de limas tamanho ISO 50 de 25mm;
- V04 0373 025 055: 6 unidades de limas tamanho ISO 55 de 25mm;
- V04 0373 025 060: 6 unidades de limas tamanho ISO 60 de 25mm;
- V04 0373 025 070: 6 unidades de limas tamanho ISO 70 de 25mm;
- V04 0373 025 080: 6 unidades de limas tamanho ISO 80 de 25mm;
- V04 0373 025 240: 6 unidades de limas tamanhos ISO 45-80 de 25mm;
- V04 0373 025 090: 6 unidades de limas tamanho ISO 90 de 25mm;
- V04 0373 025 100: 6 unidades de limas tamanho ISO 100 de 25mm;
- V04 0373 025 110: 6 unidades de limas tamanho ISO 110 de 25mm;
- V04 0373 025 120: 6 unidades de limas tamanho ISO 120 de 25mm;
- V04 0373 025 130: 6 unidades de limas tamanho ISO 130 de 25mm;
- V04 0373 025 140: 6 unidades de limas tamanho ISO 140 de 25mm;
- V04 0373 025 260: 6 unidades de limas tamanhos ISO 90-140 de 25mm;
- V04 0373 031 008: 6 unidades de limas tamanho ISO 08 de 31mm;
- V04 0373 031 010: 6 unidades de limas tamanho ISO 10 de 31mm;
- V04 0373 031 220: 6 unidades de limas tamanhos ISO 08-10 de 31mm;
- V04 0373 031 015: 6 unidades de limas tamanho ISO 15 de 31mm;
- V04 0373 031 020: 6 unidades de limas tamanho ISO 20 de 31mm;
- V04 0373 031 025: 6 unidades de limas tamanho ISO 25 de 31mm;
- V04 0373 031 030: 6 unidades de limas tamanho ISO 30 de 31mm;
- V04 0373 031 035: 6 unidades de limas tamanho ISO 35 de 31mm;
- V04 0373 031 040: 6 unidades de limas tamanho ISO 40 de 31mm;
- V04 0373 031 230: 6 unidades de limas tamanhos ISO 15-40 de 31mm;

### VDW GmbH

Bayerwaldstr. 15, D-81737, Munique  
Alemanha

### Registrado por:

DENTSPLY Indústria e Comércio Ltda.  
Rua José Francisco de Souza, 1926 - CEP 13633412 - Pirassununga-SP  
CNPJ 31.116.239/0001-55 - Indústria Brasileira  
www.dentsply.com.br - SAC: 0800 771 2226 (Somente no Brasil)  
Responsável Técnico: Luiz Carlos Crepaldi - CRQ-SP: 04208396  
Registros ANVISA nº 80196880340

- V04 0373 031 045: 6 unidades de limas tamanho ISO 45 de 31mm;
- V04 0373 031 050: 6 unidades de limas tamanho ISO 50 de 31mm;
- V04 0373 031 055: 6 unidades de limas tamanho ISO 55 de 31mm;
- V04 0373 031 060: 6 unidades de limas tamanho ISO 60 de 31mm;
- V04 0373 031 070: 6 unidades de limas tamanho ISO 70 de 31mm;
- V04 0373 031 080: 6 unidades de limas tamanho ISO 80 de 31mm;
- V04 0373 031 240: 6 unidades de limas tamanhos ISO 45-80 de 31mm;
- V04 0373 031 090: 6 unidades de limas tamanho ISO 90 de 31mm;
- V04 0373 031 100: 6 unidades de limas tamanho ISO 100 de 31mm;
- V04 0373 031 110: 6 unidades de limas tamanho ISO 110 de 31mm;
- V04 0373 031 120: 6 unidades de limas tamanho ISO 120 de 31mm;
- V04 0373 031 130: 6 unidades de limas tamanho ISO 130 de 31mm;
- V04 0373 031 140: 6 unidades de limas tamanho ISO 140 de 31mm;
- V04 0373 031 260: 6 unidades de limas tamanhos ISO 90-140 de 31mm.

### Composição

A lima Hedstroem® foi projetada com uma parte ativa de aço inoxidável DIN 1.4310, um stop de silicone (como suporte visual para manter o comprimento de trabalho) e um cabo feito de polieterimida na parte superior do instrumento.

### Indicações de Uso

A lima Hedstroem® é indicada para utilização em tratamentos endodônticos convencionais de canais radiculares. É utilizada para suavizar o canal radicular em movimento de imagem/escovação sem rotação com uma alta capacidade de corte eficiente. Ela fornece um rápido e eficiente alargamento do canal radicular especialmente para a seção reta do canal. Este instrumento deve ser utilizado apenas por dentistas treinados.

### Contraindicações

Não aplicável.

### Advertências

As limas são instrumentos exclusivos de uso odontológico e não devem ser utilizadas para outros fins.

### Precauções

As limas são fornecidas estéreis, mas podem ser reutilizadas (no máximo 8 vezes), devendo-se garantir que apenas procedimentos validados e equipamentos calibrados e submetidos regularmente à manutenção sejam utilizados na limpeza/desinfecção e esterilização das limas, a cada uso. Os procedimentos de limpeza e desinfecção são pré-requisitos essenciais para uma efetiva esterilização.

### Efeitos Adversos

Não se aplica.

### Instruções Passo a Passo

A lima Hedstroem® é utilizada para preparar um canal radicular para preenchimento. A lima deve limpar o canal radicular e colocá-lo em uma forma cônica, o que permite um preenchimento estreito do canal radicular. A seção transversal produzida durante a moagem tem a forma de um círculo. As limas Hedstroem são adequadas para canais radiculares retos ou ligeiramente curvos ou partes retas de um canal radicular mais fortemente curvado.

### Cuidados de Conservação

A lima Hedstroem® deve ser armazenada em temperatura entre 0°-30°C, umidade relativa entre 50-60% e ao abrigo de radiação solar.

Lote: Vide Rótulo do Produto

Prazo de Validade: 05 anos