

### Apresentação:

05130150000 - JELTRATE DUSTLESS 410g;  
05130200000 - JELTRATE DUSTLESS 20,5g;

### Composição

Alginato de potássio; Sulfato de cálcio; Tetrapirofosfato de sódio; Fluotitanato de potássio; Polipropileno glicol; Óxido de magnésio; Diatomita; Pigmento; Aroma.

### Indicações de Uso

Os componentes da família de ALGINATOS são indicados para moldagens totais ou parciais de bocas dentadas e desdentadas, em trabalhos de próteses totais ou parciais removíveis, na confecção de modelos de estudos para trabalhos de ortodontia, também é útil em moldagens para a confecção de restaurações unitárias e múltiplas, coroas e pontes fixas.

Entretanto, devido às peculiaridades de cada modelo, há técnicas de moldagem que são mais ou menos adequadas a cada modelo, como é mostrado abaixo:

JELTRATE DUSTLESS – indicado para moldagens totais ou parciais de bocas dentadas e desdentadas, em trabalhos de próteses totais ou parciais removíveis, na confecção de modelos de estudos para trabalhos de ortodontia, também é útil em moldagens para a confecção de restaurações unitárias e múltiplas, coroas e pontes fixas.

### Contraindicações

Os ALGINATOS não devem ser misturados ou usados em conjunto com outros alginatos, pois poderá alterar suas propriedades.

### Advertências

Produto pode causar reação alérgica.

### Precauções

- Para Uso Odontológico
- Contém sílica, a inalação do pó seco pode ser prejudicial à saúde.
- Recomenda-se manipular com máscara de proteção facial.
- Recomenda-se que durante todos os procedimentos clínicos profissional, auxiliares assim como pacientes utilizem óculos de proteção
- As impressões devem ser sempre lavadas e desinfetadas, conforme recomendam a ADA, CDC e o OSHA.

### Efeitos Adversos

Não se aplica.

#### Fabricado por:

Dentsply Indústria e Comércio Ltda.  
Rua José Francisco de Souza, 1926 – CEP 13633412 – Pirassununga - SP  
CNPJ 31.116.239/0001-55 - Indústria Brasileira  
www.dentsply.com.br – SAC: 0800 771 2226 (Somente no Brasil)  
Responsável Técnico: Luiz Carlos Crepaldi – CRQ-SP: 04208396  
Cadastro ANVISA nº 80196880224

#### Importado e Distribuído por:

Dentsply Argentina S.A.C.I. - Gral. Enrique Martínez 657/661 CP  
1426BBI C.A.B.A. Dirección Técnica: Maria Veronica Ibarra MN  
Nº 16837 - Autorizado por A.N.M.A.T. PM Nº 1093-12 - Dentsply  
Finance Co. - Carrera 19B Nº 84-47 - Registro Sanitario INVIMA:  
2011DM-0008360 - Bogotá - Colombia - D.C.

## Instruções Passo a Passo

### Acessórios

- 1 colher medidora para pó
- 1 frasco medidor de água graduado em 3 níveis

### Medida

Para cada medida de pó (1 colher), utilizar 1/3 da medida de água.

### Preparo

- Sempre com auxílio dos medidores, medir a quantidade de água e de Jeltrate Dustless necessários à moldagem, certificando-se de que não existam espaços vazios na colher no momento da dosagem do pó.
- Espatular a mistura por aproximadamente 1 minuto até que fique homogênea.
- Colocar a mistura na moldeira e, logo em seguida, inserir a moldeira na cavidade bucal, comprimindo-a levemente.
- Fazer as correções musculares e manter a moldeira firme durante 1 minuto e 20 segundos.
- Após tomar presa, remover a impressão da boca e enxaguá-la em água corrente

Tempo de manipulação	Tempo para colocar a mistura na moldeira	Tempo da moldeira na boca	Tempo total de presa
1 minuto	20 segundos	1 minuto e 20 segundos	2 minutos e 40 segundos

Se o molde for conservado em um umidificador, será possível vaziar o gesso até 96h após a moldagem. Jamais armazenar o molde em água.

### Dicas

- Sempre agitar o pó Jeltrate Dustless antes do uso;
- Utilizar o medidor de pó para garantir a quantidade ideal à mistura. Os excessos devem ser removidos com a espátula;
- Para cada medida de pó adicione 1/3 da medida de água à temperatura de 23°C aproximadamente.
- A água fria retarda e a água quente acelera o processo químico.

## Cuidados de Conservação

Conservar ao abrigo de calor e umidade.

### Fabricado por:

Dentsply Indústria e Comércio Ltda.  
Rua José Francisco de Souza, 1926 – CEP 13633412 – Pirassununga - SP  
CNPJ 31.116.239/0001-55 - Indústria Brasileira  
www.dentsply.com.br – SAC: 0800 771 2226 (Somente no Brasil)  
Responsável Técnico: Luiz Carlos Crepaldi – CRQ-SP: 04208396  
Cadastro ANVISA nº 80196880224

### Importado e Distribuído por:

Dentsply Argentina S.A.C.I. - Gral. Enrique Martínez 657/661 CP  
1426BBI C.A.B.A. Dirección Técnica: Maria Veronica Ibarra MN  
Nº 16837 - Autorizado por A.N.M.A.T. PM Nº 1093-12 - Dentsply  
Finance Co. - Carrera 19B Nº 84-47 - Registro Sanitario INVIMA:  
2011DM-0008360 - Bogotá - Colombia - D.C.

### Presentación:

05130150000 - JELTRATE DUSTLESS 410g;  
05130200000 - JELTRATE DUSTLESS 20,5g;

### Composición

Alginato de Potasio; Sulfato de Calcio; Tetrapirofosfato de Sodio; Fluotitanato de Potasio; Polipropilenglicol; Óxido de Magnesio; Diatomita; Pigmento; Aroma.

### Indicaciones de uso

Los componentes de la familia de ALGINATOS son indicados para moldes totales o parciales de bocas dentadas y desdentadas, en trabajos de prótesis totales o parciales removibles, en la confección de modelos de estudios para trabajos de ortodoncia, también es útil en moldes para la confección de restauraciones unitarias y múltiples, coronas y puentes fijos.

Sin embargo, debido a las peculiaridades de cada modelo, hay técnicas de moldeo que son más o menos adecuadas a cada modelo, como se muestra a continuación:

JELTRATE DUSTLESS - indicado para moldes totales o parciales de bocas dentadas y desdentadas, en trabajos de prótesis totales o parciales removibles, en la confección de modelos de estudios para trabajos de ortodoncia, también es útil en moldes para la confección de restauraciones unitarias y múltiples, coronas y puentes fijos.

### Contra indicaciones

Los ALGINATOS no deben mezclarse o utilizarse junto con otros alginatos, ya que pueden cambiar sus propiedades.

### Advertencias

El producto puede causar una reacción alérgica

### Precauciones

- Para uso odontológico
- Contiene sílice, la inhalación del polvo seco puede ser perjudicial para la salud.
- Se recomienda manipular con máscara de protección facial.
- Se recomienda que durante todos los procedimientos clínicos profesionales, auxiliares así como pacientes utilicen gafas de protección
- Las impresiones siempre deben lavarse y desinfectarse, según lo recomendado por ADA, CDC y OSHA.

### Efectos adversarios

No se aplican.

#### Fabricado por:

Dentsply Indústria e Comércio Ltda.  
Rua José Francisco de Souza, 1926 – CEP 13633412 - Pirassununga - SP  
CNPJ 31.116.239/0001-55 - Indústria Brasileira  
www.dentsply.com.br – SAC: 0800 771 2226 (Sólo en Brasil)  
Responsable técnico: Luiz Carlos Crepaldi – CRQ-SP: 04208396  
Registro ANVISA nº 80196880224

#### Importado y Distribuido por:

Dentsply Argentina S.A.C.I. - Gral. Enrique Martínez 657/661 CP  
1426BBI C.A.B.A. Dirección Técnica: Maria Veronica Ibarra MN  
Nº 16837 - Autorizado por A.N.M.A.T. PM Nº 1093-12 - Dentsply  
Finance Co. - Carrera 19B Nº 84-47 - Registro Sanitario INVIMA:  
2011DM-0008360 - Bogotá - Colombia - D.C.

## Instrucciones paso a paso

### Accesorios

- 1 cuchara medidor para polvo
- 1 frasco medidor de agua graduado en 3 niveles

### Medida

Para cada medida de polvo (1 cuchara), utilizar 1/3 de la medida de agua.

### Preparación

- Siempre con ayuda de los medidores, medir la cantidad de agua y de Jeltrate Dustless necesarios para el moldeo, asegurándose de que no haya espacios vacíos en la cuchara en el momento de la dosificación del polvo.
- Pasar la espátula en la mezcla por aproximadamente 1 minuto hasta que quede homogénea.
- Colocar la mezcla en la cubeta y, a continuación, insertar la cubeta en la cavidad bucal, comprimiéndola levemente.
- Hacer las correcciones musculares y mantener la plancha firme durante 1 minuto y 20 segundos.
- Después de tomar presa, quitar la impresión de la boca y enjuagarla en agua corriente.

Tiempo de manipulación	Tiempo para colocar la mezcla en la cubeta	Tiempo de la cubeta en la boca	Tiempo total de presa
1 minuto	20 segundos	1 minuto y 20 segundos	2 minutos y 40 segundos

Si el molde se conserva en un humidificador, será posible vaciar el yeso hasta 96h después del moldeo. Jamás almacenar el molde en agua.

### Consejos

- Siempre agitar el polvo Jeltrate Dustless antes del uso;
- Utilizar el medidor de polvo para garantizar la cantidad ideal a la mezcla. Los excesos deben ser removidos con la espátula;
- Para cada medida de polvo añadir 1/3 de la medida de agua a una temperatura de 23°C aproximadamente.
- El agua fría se retrasa y el agua caliente acelera el proceso químico

## Cuidados de Conservación

Conservar al abrigo de calor y humedad.

### Fabricado por:

Dentsply Indústria e Comércio Ltda.  
Rua José Francisco de Souza, 1926 – CEP 13633412 - Pirassununga - SP  
CNPJ 31.116.239/0001-55 - Indústria Brasileira  
www.dentsply.com.br – SAC: 0800 771 2226 (Sólo en Brasil)  
Responsable técnico: Luiz Carlos Crepaldi – CRQ-SP: 04208396  
Registro ANVISA nº 80196880224

### Importado y Distribuido por:

Dentsply Argentina S.A.C.I. - Gral. Enrique Martínez 657/661 CP  
1426BBI C.A.B.A. Dirección Técnica: María Verónica Ibarra MN  
Nº 16837 - Autorizado por A.N.M.A.T. PM Nº 1093-12 - Dentsply  
Finance Co. - Carrera 19B Nº 84-47 - Registro Sanitario INVIMA:  
2011DM-0008360 - Bogotá - Colombia - D.C.