

Pasta Profilática Odahcam

Pasta para Profilaxia e Polimento Dental

Instruções de Uso

Descrição

A Pasta Profilática Odahcam é indicada para uso em procedimentos de profilaxia e polimento, como parte do tratamento profissional de prevenção da cárie e doença periodontal.

Apresentação

Bisnaga contendo 50g de pasta no sabor Tutti-Frutti.

Composição

Pedra Pomes; Carbonato de Cálcio; Glicerina; Água; Sorbitol; Corante; Aromatizantes; Espessantes; Edulcorantes e Preservativos.

Precauções

- 1 -Manter sempre a bisnaga hermeticamente fechada a fim de evitar alteração na consistência da pasta.
- 2 -Evitar a ingestão da pasta, o que pode ocasionar náuseas. Em caso de ingestão excessiva, administrar grande quantidade de água.

Modo de Usar

Remover da bisnaga e colocar em um pote dappen limpo a quantidade necessária de pasta para uma profilaxia. Fechar imediatamente a bisnaga após a remoção do material, afim de evitar a alteração na consistência do produto. Com um motor de baixa rotação, dirigir a taça de borracha (ou escova de Robinson) contra a superfície da pasta até preenchê-la. Iniciar a profilaxia por vestibular e lingual, evitando pressão excessiva e mantendo a taça de borracha em ângulo de 90º com relação à superfície do dente. Para oclusal, recomenda-se o uso de escova de Robinson para sulcos profundos, tomando cuidado para não ferir as margens gengivais. Nos locais de difícil acesso, como nas faces proximais, recomenda-se o uso de fio ou fita dental impregnados com pequenas quantidades de pasta. NOTA: Durante a limpeza e o polimento, a taça (ou escova) deve conter sempre a pasta, para evitar aquecimento excessivo do dente. O controle da salivagem deve ser feito para evitar a diluição da pasta e sua deglutição.

Armazenamento e Transporte

Conservar ao abrigo de calor e umidade.

Nº do Lote: Vide Rótulo.

Prazo de Validade: 36 meses

Uso Único. Uso Profissional.

DENTSPLY Indústria e comércio Ltda.

Rua José Francisco de Souza, 1926 - Distrito Industrial,
Pirassununga - SP - Cep: 13633-412 - CNPJ: 31.116.239/0001-55
- Inscrição Estadual: 536.087.129.119 - www.dentsply.com.br -
Central de Relacionamento: 0800 771 2226 (Somente no Brasil)
Cadastro ANVISA: 10186370142 - Responsável Técnico: Luiz
Carlos Crepaldi - CRQ-SP: 04208396 - Indústria Brasileira

Importado e Distribuído por:

Dentsply Argentina S.A.C.I.-Gral. Enrique Martínez 657/661-CP 1426BBI
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Dirección Técnica: Nora Canoura-MN°2800
Dentsply Chile Comercial Ltda. - Valenzuela Castillo 1063 - Providencia
Santiago - Chile
Dentsply Finance Co. -Carrera 19B N°84-47 -Bogotá, D.C - Colombia