

CIMENTO CIRÚRGICO PERIO BOND

Cimentos Odontológicos

Apresentação

Caixa contendo 1 bisnaga de Pasta Base com 90g e 1 bisnaga de Pasta Aceleradora com 90g.

Composição

Base: Ácidos Graxos, Resina Sintética, Hidrocarboneto Saturado, Timol, Cera Natural e Essência de Menta.

Acelerador: Óleo Natural, Óxido de Zinco, Hidrocarboneto Saturado, Timol, Pigmento, Óxido de Magnésio, BHT e Essência de Menta.

Indicações de Uso

PerioBond é um cimento cirúrgico indicado para uso em cirurgias periodontais. Por não conter eugenol em sua composição, permite sua utilização em regiões mais sensíveis da mucosa oral sem causar irritação ou desconforto ao paciente. PerioBond é uma pasta macia que adquire excelente plasticidade após a presa. PerioBond possui aroma e sabor agradáveis.

Advertências e Precauções

1. Manter os tubos fechados e ao abrigo de umidade.
2. Contém Timol. Pode causar reações adversas em pessoas suscetíveis. Se existir uma conhecida alergia a óleos essenciais fenólicos, descontinuar o uso.

Modo de Usar

1. Dispensar comprimidos iguais das pastas Base e Acelerador.
2. Misturar com uma espátula por 30 a 45 segundos, até obter uma pasta de coloração rósea uniforme.
3. Se for desejável uma mistura mais consistente, pode-se adicionar uma pequena quantidade de Óxido de Zinco.
4. Após a mistura das pastas, aguardar 2 a 3 minutos e então confeccionar um rolete com a massa. Para evitar a aderência aos dedos, lubrificar os mesmos com vaselina líquida.

Cuidados de Conservação

Conservar ao abrigo de umidade e luz solar direta.

Prazo de Validade: 3 anos.

Uso Profissional. Proibido Reprocessar.

Cemento Quirúrgico Perio Bond - Cimento Dental

Presentación

Cada caja contiene 1 tubo de Pasta Base con 90g y 1 tubo de Pasta Aceleradora con 90g.

Composición

Base: Ácidos Grasos, Resina Sintética, Hidrocarburo Saturado, Timol, Cera Natural y Esencia Menta.

Acelerador: Óleo Natural, Óxido de Zinc, Hidrocarburo Saturado, Timol, Pigmento, Óxido de Magnésio, BHT y Esencia Menta.

Indicaciones del uso

PerioBond es un cemento indicado para uso en cirugías periodontais. Por no contener eugenol en su composición, permite su utilización en regiones más sensibles de la mucosa oral sin causar irritación o malestar al paciente. PerioBond es una pasta suave que adquire excelente plasticidad después del fraguado. PerioBond tiene aroma y sabor agradables.

Precauciones y advertencias

1. Mantener los tubos cerrados y protegidos de la humedad.
2. Contiene Timol. Puede causar reacciones adversas en personas susceptibles. Descontinuar el uso en el caso de existir una alergia conocida a óleos esenciales fenólicos.

Modo de Usar

1. Usar medidas iguales de las pastas Base y Aceleradora;
2. Mezclar con una espátula por 30 a 45 segundos, hasta obtener una pasta uniforme de coloración rosada.
3. En el caso de desear una mezcla más consistente, se puede agregar una pequeña cantidad de Óxido de Zinc.
4. Después de mezclar las dos pastas, esperar 2 o 3 minutos y entonces confeccionar un rollito con la masa. Para evitar la adherencia en los dedos, lubricarlos con vaselina líquida.

Cuidados de Conservación

Mantener protegido de la humedad y la luz solar directa.

Plazo de validez: 3 años.

Uso Profesional. Prohibido reprocessar.

Fabricado por/Hecho por:

DENTSPLY Indústria e Comércio Ltda.
Rua Alice Hevê, 86 – CEP 25665-010 - Petrópolis-RJ
CNPJ 31.116.239/0001-55 - Indústria Brasileira
www.dentsply.com.br – SAC: 0800 721 1200
Responsável Técnico: Luiz Augusto Vieira – CRF/RJ nº
23107 - Registros ANVISA nº 10186370189

Importado y Distribuido por:

DENTSPLY Argentina S.A.C.I. Gral. Enrique Martínez 657/661
CP 1426BBI C.A.B.A. Dirección Técnica: Nora Canoura MN Nº: 2800
Autorizado por A.N.M.A.T. - PM Nº 1093-71

Dentsply Chile Comercial Ltda.
Miguel Claro 285 - Providencia - Santiago – Chile

Dentsply Finance Co. - Carrera 19B nº 84-47, Bogotá - D.C. Registro Sanitario INVIMA 2010DM-0006781