

# DENSPLY

## PROVY Cimento Provisório

Provy é um cimento indicado para fixação provisória de restaurações simples ou múltiplas. Provy, com sua fórmula avançada, apresenta consistência fina, ótimo escoamento e resistência adequada para suportar as cargas mastigatórias.

Provy apresenta baixa solubilidade nos fluidos bucais e é de fácil remoção quando desejado.

### COMPOSIÇÃO:

Base: Óxido de zinco, óleo mineral e corantes minerais  
Acelerador: Eugenol, resinas sintéticas, cera e acetato de zinco.

### MODO DE USAR:

- 1- Secar os preparos cavitários e/ou estruturas dentais que irão receber o cimento e isolar com rolos de algodão ou dique de borracha.
- 2- Sobre um bloco de mistura, dispensar comprimentos iguais das pastas base e aceleradora.
- 3- Com uma espátula metálica, espátular vigorosamente por 30 segundos de modo a obter uma pasta fina e homogênea.
- 4- Aplicar uma fina camada do cimento no interior do trabalho protético.
- 5- Assentar firmemente o trabalho protético na posição correta
- 6- 2 minutos após a presa, recortar os excessos.

Nota: O tempo de presa a 37°C (temperatura bucal) é de aproximadamente 3 minutos

### PRECAUÇÕES:

- Provy é sensível à umidade. A absorção de umidade provoca diminuição do tempo de presa. Fechar os tubos hermeticamente após cada uso.
- Devido a presença de eugenol , Provy pode impedir a correta polimerização de resinas metacrílicas ou ainda o amolecimento das cadeias poliméricas.
- Eugenol, assim como qualquer óleo essencial, pode provocar reações alérgicas em pessoas suscetíveis. Caso exista histórico conhecido de alergia ou sensibilização, descontinue o uso.

### APRESENTAÇÃO:

Kit contendo  
01 bisnaga de pasta aceleradora com 15g  
01 bisnaga de pasta base com 42g

PRAZO DE VALIDADE:  
3 anos

### USO PROFISSIONAL

DENSPLY Indústria e Comércio Ltda. - Rua Alice Hervé, 86 - CEP 25665-010  
Petrópolis - RJ - CNPJ 31.116.239/0001-55 - www.dentsply.com.br  
Central de Relacionamento: 0800 721 1200 - Registro ANVISA nº 10186370177  
Resp. Técnico: Marcelle Cortezia - CRF-RJ Nº 7999 - Indústria Brasileira

Importado e Distribuído em Latino América por:  
DENTSPLY Argentina S.A.C.I. Gral. Enrique Martínez 657/661  
CP 1426BBI Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Dirección Técnica: Nora Canoura - Autorizado por A.N.M.A.T. - PM Nº 1093-59  
Dentsply Chile Comercial Ltda. - Miguel Claro 285 - Providencia - Santiago - Chile  
Dentsply Finance Co. - Carrera 19B Nº 84-47 - Bogotá, D.C. - Colombia

11 71 006 0000 - Rev. 04



"ECONOMIZE ENERGIA  
RECYCLAR MATERIAIS  
E PRESERVAR  
O MEIO AMBIENTE."

# DENSPLY

## PROVY Cemento Provisorio

Provy es un cemento indicado para fijar provisionalmente de restauraciones simples o múltiples. Provy, con su fórmula avanzada, presenta consistencia fina, óptima fluidez y resistencia adecuada para soportar las cargas masticatorias.

Provy presenta baja solubilidad en los fluidos bucales y fácil remoción cuando deseado.

### COMPOSICIÓN:

Base: Óxido de zinc, aceite mineral y colorantes minerales  
Acelerador: Eugenol, resinas sintéticas, cera y acetato de zinc.

### MODO DE USAR:

- 1- Secar las preparaciones cavitarias y/o estructuras dentales que irán recibir el cemento y aislar con rollos de algodón o dique de caucho;
- 2- Sobre un bloque de mezclar, dispensar bandas de mismo largor de las pastas base y aceleradora;
- 3- Con una espátula metálica, mezclar vigorosamente por 30 segundos hasta obtener una pasta fina y homogénea;
- 4- Aplicar una fina camada de cemento en el interior del trabajo protético;
- 5- Asentar firmemente el trabajo protético en la posición correcta;
- 6- 2 minutos después del curado, recortar los excesos;

Nota: El tiempo de curado a 37°C (temperatura bucal) es aproximadamente 3 minutos

### PRECAUCIONES:

- Provy es sensible a la humedad: la absorción de humedad provoca disminución del tiempo de curado. Cerrar herméticamente los tubos después de usarlos.
- Debido a la presencia de eugenol , Provy puede impedir la correcta polimerización de resinas metacrílicas o ablandar las cadenas poliméricas;
- Eugenol, así como cualquier otro aceite esencial, puede provocar reacciones alérgicas en personas susceptibles. En caso exista histórico conocido de alergia o sensibilización, descontinúe el uso.

### PRESENTACIÓN:

Kit conteniendo  
01 tubo de pasta aceleradora con 15g  
01 tubo de pasta base con 42g

PLAZO DE VALIDAD:  
3 años

### USO PROFESIONAL

DENSPLY Indústria e Comércio Ltda. - Rua Alice Hervé, 86 - CEP 25665-010  
Petrópolis - RJ - CNPJ 31.116.239/0001-55 - www.dentsply.com.br  
Central de Relacionamento: 0800 721 1200 - Registro ANVISA nº 10186370177  
Resp. Técnico: Marcelle Cortezia - CRF-RJ Nº 7999 - Indústria Brasileira

Importado e Distribuído em Latino América por:  
DENTSPLY Argentina S.A.C.I. Gral. Enrique Martínez 657/661  
CP 1426BBI Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Dirección Técnica: Nora Canoura - Autorizado por A.N.M.A.T. - PM Nº 1093-59  
Dentsply Chile Comercial Ltda. - Miguel Claro 285 - Providencia - Santiago - Chile  
Dentsply Finance Co. - Carrera 19B Nº 84-47 - Bogotá, D.C. - Colombia

11 71 006 0000 - Rev. 04



"ECONOMIZE ENERGIA  
RECYCLAR MATERIALES  
E PRESERVAR  
EL MEDIO AMBIENTE."