

Apresentação

Precise SX Denso (Alta viscosidade), Precise SX Fluido (Baixa viscosidade) e Precise SX Catalisador.

Composição

Precise SX Denso: Polissiloxano (polidimetilsiloxano), vaselina, sílica, corante e aroma.

Precise SX Fluido Polissiloxano (polidimetilsiloxano), sílica, corante e aroma.

Precise SX Catalisador: Hidrocarbonetos, Corante, Silicato de tetraetila, Dibutil dilaurato de estanho e aroma.

Indicações de Uso

O sistema de moldagem Precise são silicões de condensação de longo estudo clínico, indicados nas técnicas de passo único e dupla moldagem, onde os resultados atingidos em moldagem de coroas, pontes, inlays e onlays são perfeitos.

Contraindicações

Não se aplica.

Advertências e Precauções

- Precise destina-se apenas para uso odontológico;
- Os tempos de trabalhos são considerados para uma temperatura de 23°C. O aumento da temperatura acelera a presa e temperaturas mais baixas prolongam o tempo de presa;
- O aumento da quantidade de Precise Catalisador reduz o tempo de trabalho;
- Evitar o contato com roupas e vestimentas de proteção, pois os silicões não podem ser quimicamente removidos;
- Manter afastado dos olhos. Recomenda-se o uso de óculos de proteção para pacientes, auxiliares e profissionais, durante todos os procedimentos clínicos;
- Catalisador é irritante. Aconselha-se utilizar luvas de látex para manusear o produto.

Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância e procure auxílio médico.

Em caso de contato com a pele, remova imediatamente o produto com algodão e lave com sabão neutro e água.

Em caso de irritação da pele, suspenda o uso imediatamente e procure o auxílio médico.

IMPORTANTE: Estocar as bisnagas na posição horizontal.


Efeitos Adversos

Não se aplica.

Instruções Passo a Passo

-Precise SX Denso e Precise SX Catalisador:

Dosagem:

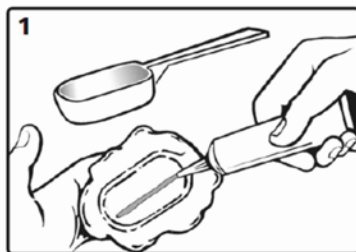

Recolher com o medidor a quantidade necessária de Precise SX Denso e espalhá-la na mão (nota: o medidor deve estar raso). Carregar o bordo do medidor na pasta quantas vezes quantos os medidores doseados. Por cada medidor de material, espalhar 1 faixa de Precise SX Catalisador com o mesmo comprimento de doseador (equivalente a 4 cm).

DENTSPLY Indústria e comércio Ltda.

Rua José Francisco de Souza, 1926 - Distrito Industrial,
Pirassununga - SP - Cep: 13633-412 - CNPJ: 31.116.239/0001-55
- Inscrição Estadual: 536.087.129.119 - www.dentsply.com.br -
Central de Relacionamento: 0800 771 2226 (Somente no Brasil)
Cadastro ANVISA: 80196880237 - Responsável Técnico: Luiz
Carlos Crepaldi - CRQ-SP: 04208396 - Indústria Brasileira


Importado y Distribuido por: DENTSPLY Argentina S.A.C.I.
Gral. Enrique Martínez 657/661
CP 1426BBI C.A.B.A. Dirección Técnica: Nora Canoura MN Nº: 2800
Autorizado por A.N.M.A.T.-PM Nº 1093-124 - Dentsply Chile Comercial Ltda.
Valenzuela Castillo 1063 -Providencia -Santiago -Chile
Dentsply Finance Co. -Carrera 19B nº 84-47, Bogotá -D.C. Registro
Sanitario INVIMA 2013DM-0010180

Precise SX


Material de Moldagem Odontológico

Instruções de Uso

Mistura:

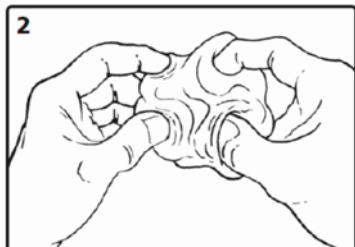

Dobrar a pasta sobre si mesma e empastar energicamente com a ponta dos dedos durante aproximadamente 30 seg. até se atingir uma tonalidade de cor homogênea e sem estrias.

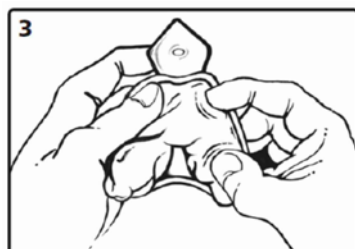


Espalhar a pasta misturada na moldeira. O tempo de trabalho, incluindo a mistura, é de aproximadamente 1 minuto e 15 segundos.



Introduzir na cavidade oral e aguardar o endurecimento que se dará em aproximadamente 3 minutos e 15 segundos.

-Precise SX Fluido e Precise SX Catalisador:

Dosagem:

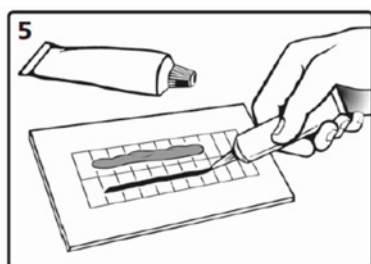


Extrair do tubo a quantidade necessária ao longo da escala de dosagem do bloco de mistura. Dosear uma quantidade de Precise SX Catalisador equivalente ao comprimento do Precise SX Fluido.

DENTSPLY Indústria e comércio Ltda.


Rua José Francisco de Souza, 1926 - Distrito Industrial,
Pirassununga - SP - Cep: 13633-412 - CNPJ: 31.116.239/0001-55
- Inscrição Estadual: 536.087.129.119 - www.dentsply.com.br -
Central de Relacionamento: 0800 771 2226 (Somente no Brasil)
Cadastro ANVISA: 80196880237 - Responsável Técnico: Luiz
Carlos Crepaldi - CRQ-SP: 04208396 - Indústria Brasileira

Importado y Distribuido por: DENTSPLY Argentina S.A.C.I.
Gral. Enrique Martínez 657/661
CP 1426BBI C.A.B.A. Dirección Técnica: Nora Canoura MN Nº: 2800
Autorizado por A.N.M.A.T.-PM Nº 1093-124 - Dentsply Chile Comercial Ltda.
Valenzuela Castillo 1063 -Providencia -Santiago -Chile
Dentsply Finance Co. -Carrera 19B nº 84-47, Bogotá -D.C. Registro
Sanitario INVIMA 2013DM-0010180

Mistura:

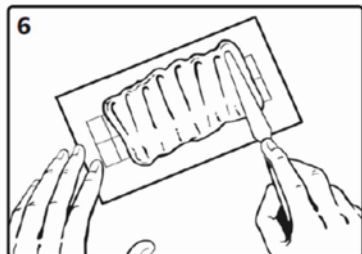

Misturar energicamente com a espátula e depois, para eliminar o ar contido, recolher e espalmar com cuidado a pasta exercitando uma pressão no bloco de mistura. Repetir a operação até se obter uma tonalidade de cor homogênea. O tempo de mistura ideal é de aproximadamente 30 segundos.

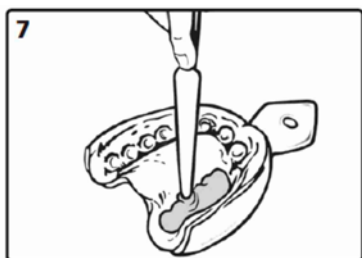

Aplicar a pasta misturada na moldeira com a espátula ou com uma seringa para elastômeros. O tempo de trabalho, incluindo mistura, é de aproximadamente 2 minutos.



Introduzir na cavidade oral e aguardar o endurecimento que se dá em aproximadamente 3 minutos e 30 segundos.

O Precise SX Fluido e Precise SX Denso são também recomendados para a técnica de dupla moldagem.

Cuidados de Conservação

Armazenar ao abrigo de umidade e em temperatura ambiente.

Nº do Lote: Vide Rótulo.

Prazo de Validade: 3 anos.

Proibido Reprocessar.

Uso Profissional.

DENTSPLY Indústria e comércio Ltda.

Rua José Francisco de Souza, 1926 - Distrito Industrial,
Pirassununga - SP - Cep: 13633-412 - CNPJ: 31.116.239/0001-55
- Inscrição Estadual: 536.087.129.119 - www.dentsply.com.br -
Central de Relacionamento: 0800 771 2226 (Somente no Brasil)
Cadastro ANVISA: 80196880237 - Responsável Técnico: Luiz
Carlos Crepaldi - CRQ-SP: 04208396 - Indústria Brasileira

Importado y Distribuido por: DENTSPLY Argentina S.A.C.I.
Gral. Enrique Martínez 657/661
CP 1426BBI C.A.B.A. Dirección Técnica: Nora Canoura MN Nº: 2800
Autorizado por A.N.M.A.T.-PM Nº 1093-124 - Dentsply Chile Comercial Ltda.
Valenzuela Castillo 1063 -Providencia -Santiago -Chile
Dentsply Finance Co. -Carrera 19B nº 84-47, Bogotá -D.C. Registro
Sanitario INVIMA 2013DM-0010180

Presentación

Precise SX Denso (Alta viscosidad), Precise SX Fluido (Baja viscosidad) y Precise SX Catalizador.

Composición

Precise SX Denso: Polisiloxano (polidimetilsiloxano), vaselina, sílice, colorante y aroma.

Precise SX Fluido: Polisiloxano (polidimetilsiloxano), sílice, colorante y aroma.

Precise SX Catalizador: Hidrocarburos, Colorante, Silicato de tetraetilo, Dibutil dilaurato de estaño y aroma.

Indicaciones del uso

Precise SX es una silicona de condensación indicado para las técnicas de paso único y doble impresión en la reproducción de preparos realizados en las coronas unitarias, prótesis fijas, inlays y onlays.

Contraindicaciones

No existen informes, sin embargo, la irritación de la mucosa u otras reacciones alérgicas pueden producirse en personas sensibles al polisiloxano.

Advertencias y Precauciones

- Destinado únicamente para el uso odontológico;
- Todos los tiempos de trabajos son considerados a la temperatura de 23°C. El aumento de la temperatura acelera el curado y a temperaturas más bajas aumenta el tiempo de cura;
- el aumento de la cantidad de Precise catalizador disminuye el tiempo de trabajo;
- Evitar el contacto usando ropas apropiadas o guardapolvos, porque las siliconas no pueden ser químicamente retiradas;
- Mantener alejado de los ojos. Se recomienda el uso de lentes de protección de los pacientes, auxiliares y profesionales, durante todos los procedimientos clínicos;
- El catalizador es altamente irritante. Es aconsejado el uso de guantes de látex para manejar el producto;
- En caso de contacto con los ojos, lavar de inmediato con agua en abundancia y luego buscar la asistencia de un oftalmólogo. En caso de contacto con la piel, retirar de inmediato el producto con un algodón y lavar el local con jabón neutro y agua. En caso de irritación cutánea, suspender el uso y buscar la atención médica;
- Después de su uso, el tubo del catalizador debe ser mantenido herméticamente cerrado para evitar la cristalización del producto.


Efectos Adversos

No existen informes, sin embargo, la irritación de la mucosa u otras reacciones alérgicas pueden producirse en personas sensibles al polisiloxano.

Instrucciones paso a paso

-Precise SX Denso e Precise SX Catalizador:

Dosificación:

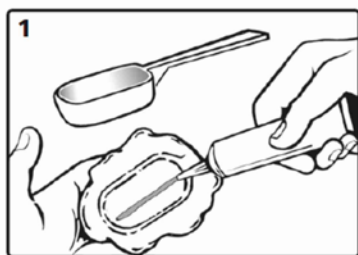

Haciendo uso de una cuchara de medida, retirar del pote la cantidad deseada de Precise SX Denso, cerciorándose de que la cuchara de medida este bien llena, es decir no debe faltar, ni tampoco en exceso de material. Presionar la masa densa contra la palma de la mano y marcar el diámetro de la cuchara medida sobre la masa densa. Para cada cucharra medida, verter 1 porción del catalizador conforme fig.1.


DENTSPLY Indústria e comércio Ltda.

Rua José Francisco de Souza, 1926 - Distrito Industrial,
Pirassununga - SP - Cep: 13633-412 - CNPJ: 31.116.239/0001-55
- Inscrição Estadual: 536.087.129.119 - www.dentsply.com.br -
Central de Relacionamento: 0800 771 2226 (Somente no Brasil)
Cadastro ANVISA: 80196880237 - Responsável Técnico: Luiz
Carlos Crepaldi - CRQ-SP: 04208396 - Indústria Brasileira

Importado y Distribuido por: DENTSPLY Argentina S.A.C.I.
Gral. Enrique Martínez 657/661

CP 1426BBI C.A.B.A. Dirección Técnica: Nora Canoura MN Nº: 2800
Autorizado por A.N.M.A.T.-PM Nº 1093-124 - Dentsply Chile Comercial Ltda.
Valenzuela Castillo 1063 -Providencia -Santiago -Chile
Dentsply Finance Co. -Carrera 19B nº 84-47, Bogotá -D.C. Registro
Sanitario INVIMA 2013DM-0010180

Mezclado:

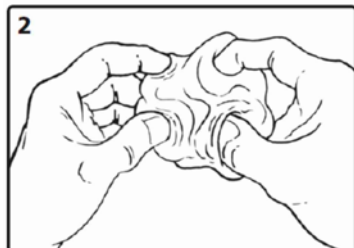

Com la punta de los dedos mezclar el material Denso y el catalizador de Precise SX hasta obtener una coloración uniforme, libre de estrias. El tiempo para realizar la homogenización completa es de 30 segundos, conforme fig, 2.




Acomodar el material en la cubeta de impresión. El tiempo para realizar esta labor es de 1 minuto y 15 segundos aproximadamente. Em esta etapa se puede realizar el alivio con una película plástica, conforme fig, 3.



Llevar todo el conjunto posicionándolo en la cavidade oral y aguardar el curado inicial que tardará unos 3 minutos y 15 segundos, conforme fig, 4.

-Precise SX Fluido e Precise SX Catalisador:

Dosificación:

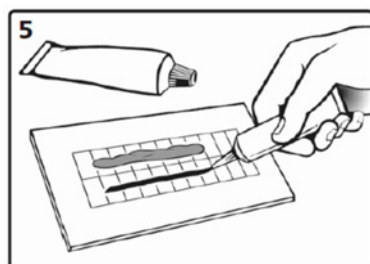

Verter em el tablero de mezcla la cantidad necesaria de Precise SX Fluido, cuidar para que el material sea hecho em línea recta, Derramar una cantidad de Precise SX Catalisador equivalente al tamaño de Precise SX Fluido.


El uso de mayor cantidad de catalizador acelera el curado de la mezcla, conforme fig,5.

DENTSPLY Indústria e comércio Ltda.


Rua José Francisco de Souza, 1926 - Distrito Industrial,
Pirassununga - SP - Cep: 13633-412 - CNPJ: 31.116.239/0001-55
- Inscrição Estadual: 536.087.129.119 - www.dentsply.com.br -
Central de Relacionamento: 0800 771 2226 (Somente no Brasil)
Cadastro ANVISA: 80196880237 - Responsável Técnico: Luiz
Carlos Crepaldi - CRQ-SP: 04208396 - Indústria Brasileira

Importado y Distribuido por: DENTSPLY Argentina S.A.C.I.
Gral. Enrique Martínez 657/661
CP 1426BBI C.A.B.A. Dirección Técnica: Nora Canoura MN Nº: 2800
Autorizado por A.N.M.A.T.-PM Nº 1093-124 - Dentsply Chile Comercial Ltda.
Valenzuela Castillo 1063 -Providencia -Santiago -Chile
Dentsply Finance Co. -Carrera 19B nº 84-47, Bogotá -D.C. Registro
Sanitario INVIMA 2013DM-0010180

Mezclado:

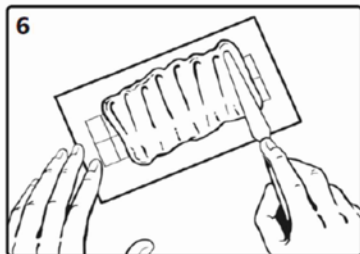

Hacer el mezclado de la pasta fluida con el catalizador usando una espátula, agitándola intensamente hasta obtener una mezcla de coloración uniforme, conforme fig. 6.

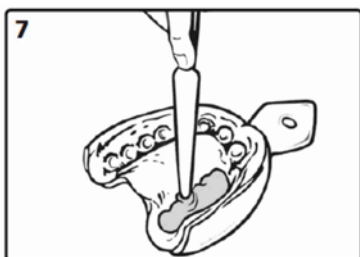

Haciendo uso de una jeringa de impresión, inyectar la mezcla en todo contorno de la preparación de la cavidade y emla cantidad apropiada em la cubeta aliviada. El tiempo de esa labor es de 2 minutos aproximadamente, conforme fig.7.



Llevar todo el conjunto posicionándolo em la cavidade oral y aguarde el curado inicial que tardará unos 3 minutos y 30 segundos, conforme fig. 8.

El Precise SX Fluido y Precise SX Denso son también recomendados para la técnica de impresión única.

Cuidados de Conservación

Precise SX Denso, Precise SX Catalizador y Precise SX Fluido deben ser almacenados lejos de la humedad y a temperatura ambiente.

Nº do Lote: Vide Rótulo.

Plazo de Validez: 3 años.

Prohibido Reprocesar.

Uso profesional.

DENTSPLY Indústria e comércio Ltda.

Rua José Francisco de Souza, 1926 - Distrito Industrial,
Pirassununga - SP - Cep: 13633-412 - CNPJ: 31.116.239/0001-55
- Inscrição Estadual: 536.087.129.119 - www.dentsply.com.br -
Central de Relacionamento: 0800 771 2226 (Somente no Brasil)
Cadastro ANVISA: 80196880237 - Responsável Técnico: Luiz
Carlos Crepaldi - CRQ-SP: 04208396 - Indústria Brasileira

Importado y Distribuido por: DENTSPLY Argentina S.A.C.I.
Gral. Enrique Martínez 657/661
CP 1426BBI C.A.B.A. Dirección Técnica: Nora Canoura MN Nº: 2800
Autorizado por A.N.M.A.T.-PM Nº 1093-124 - Dentsply Chile Comercial Ltda.
Valenzuela Castillo 1063 -Providencia -Santiago -Chile
Dentsply Finance Co. -Carrera 19B nº 84-47, Bogotá -D.C. Registro
Sanitario INVIMA 2013DM-0010180