

# Prisma Gloss

Pasta para  
Polimento

Material de Acabamento e Polimento

## Instruções de Uso

### Apresentação

Seringas contendo 5g.

### Composição

Óxido de alumínio, Polietilenoglicol Glicol, Cabosil, Sacarina Sódica e Aroma Menta.

### Indicações de Uso

Prisma Gloss é uma pasta de componente único, solúvel em água, indicada para promover o polimento final de alto brilho em restaurações de compósitos nos dentes anteriores e posteriores.

### Contraindicações

Não se aplica

### Advertências e Precauções

Não se aplica

### Efeitos Adversos

Não se aplica

### Instruções Passo a Passo

- 1- Após a polimerização, iniciar o acabamento e o contorno da restauração utilizando brocas multilaminadas. O refinamento da superfície é realizado com o auxílio das pontas de acabamento do Sistema Enhance (Discos, Taças e Chama de Vela).
- 2- Aplicar uma porção de Prisma Gloss à superfície da restauração e na superfície de um disco defeltro para baixa rotação. Com o micro-motor ajustado para uma velocidade reduzida, iniciar a seco o trabalho de polimento final da restauração realizando movimentos circulares e pressão moderada.
- 3- Com o auxílio de um conta-gotas, adicionar água em pequenas quantidades e continuar o polimento utilizando sempre movimentos circulares, baixa velocidade e pressão moderada. Se necessário, repita o procedimento para obter restaurações com superfícies altamente brilhantes.

### Cuidados de Conservação

Armazenar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C e ao abrigo de luz solar direta.

Nº do Lote: Vide Rótulo.

Prazo de Validade: 3 anos.

Proibido Reprocessar.

Uso Profissional.

#### DENTSPLY Indústria e comércio Ltda.

Rua José Francisco de Souza, 1926 - Distrito Industrial,  
Pirassununga - SP - Cep: 13633-412 - CNPJ: 31.116.239/0001-55  
- Inscrição Estadual: 536.087.129.119 - www.dentsply.com.br -  
Central de Relacionamento: 0800 771 2226 (Somente no Brasil)  
Cadastro ANVISA: 10186370126 - Responsável Técnico: Luiz  
Carlos Crepaldi - CRQ-SP: 04208396 - Indústria Brasileira

Importado y Distribuido por:

DENTSPLY Argentina S.A.C.I. Gral. Enrique Martínez 657/661  
CP 1426BBI C.A.B.A. Dirección Técnica: Nora Canoura MN Nº: 2800  
Autorizado por A.N.M.A.T.-PM Nº 1093-69  
Dentsply Chile Comercial Ltda.  
Valenzuela Castillo 1063 -Providencia -Santiago -Chile  
Dentsply Finance Co. -Carrera 19B nº 84-47, Bogotá -D.C. Registro  
Sanitario INVIMA 2017DM-0016083

# Prisma Gloss

Pasta para  
Polimento

Material de Acabamento e Polimento

## Instrucciones de uso

### Presentación

Jeringas conteniendo 5g.

### Composición

Óxido de aluminio, Polietilenoglicol Glicol, Cablesil, Sacarina Sódica y Aroma Menta.

### Indicaciones del uso

Prisma Gloss es una pasta de componente único, soluble en agua, indicada para promover el pulimento final de alto brillo en restauraciones de compositos en los dientes anteriores y posteriores.

### Contraindicaciones

No se aplica.

### Advertencias y Precauciones

No se aplica.

### Efectos Adversos

No se aplica.

### Instrucciones paso a paso

1. Después de la polimerización, iniciar el acabado y el contorno de la restauración utilizando mechas multilaminadas. El refinamiento de la superficie es realizado con el auxilio de las puntas de acabado del Sistema Enhance (Discos, Tazas y Llama de Vela).
2. Aplicar una porción de Prisma Gloss a la superficie de la restauración y en la superficie de un disco de fieltro para baja rotación. Con el micromotor ajustado a una velocidad reducida, iniciar en seco el trabajo de pulimento final de la restauración realizando movimientos circulares y presión moderada.
3. Con el auxilio de un gotero, adicionar agua en pequeñas cantidades y continuar el pulimento utilizando siempre movimientos circulares, baja velocidad y presión moderada. Si necesario, repita el procedimiento para obtener restauraciones con superficies altamente brillantes.

### Cuidados de Conservación

Almacenar a temperatura ambiente entre 15°C y 30°C y al abrigo de luz solar directa.

Nº do Lote: Vide Rótulo.

Plazo de Validez: 3 años.

Prohibido Reprocesar.

Uso profesional.

#### DENTSPLY Indústria e comércio Ltda.

Rua José Francisco de Souza, 1926 - Distrito Industrial,  
Pirassununga - SP - Cep: 13633-412 - CNPJ: 31.116.239/0001-55  
- Inscrição Estadual: 536.087.129.119 - www.dentsply.com.br -  
Central de Relacionamento: 0800 771 2226 (Somente no Brasil)  
Cadastro ANVISA: 10186370126 - Responsável Técnico: Luiz  
Carlos Crepaldi - CRQ-SP: 04208396 - Indústria Brasileira

Importado y Distribuido por:

DENTSPLY Argentina S.A.C.I. Gral. Enrique Martínez 657/661  
CP 1426BBI C.A.B.A. Dirección Técnica: Nora Canoura MN Nº: 2800  
Autorizado por A.N.M.A.T.-PM Nº 1093-69  
Dentsply Chile Comercial Ltda.  
Valenzuela Castillo 1063 -Providencia -Santiago -Chile  
Dentsply Finance Co. -Carrera 19B nº 84-47, Bogotá -D.C. Registro  
Sanitario INVIMA 2017DM-0016083