



Replak Solución (2 colores) Solución Evidenciadora de Placa Bacteriana

Replak es una solución evidenciadora a base de dos indicadores cromáticos en proporción adecuadamente formulada para que no interfiera en la acción del otro.

VENTAJAS

Replak Solución ofrece las siguientes ventajas.

- 1 - Además de colorear la placa haciéndola contrastar con los tejidos y los dientes, la placa aparece visible en regiones de visualización difícil, como por ejemplo en los espacios proximales y la región cervical.
- 2 - Tiene la propiedad de presentar tonalidades distintas entre las placas espesas y antiguas y las placas recientes y finas.

NOTA: Según literatura dental ampliamente documentada, los depósitos de placa densa y antigua están generalmente asociadas con enfermedades periodontales y exhiben una flora anaeróbica evidenciada en la bolsa periodontal. En otras palabras, la placa vieja y espesa es probablemente más patogénica que la reciente y delgada.

3 - Replak Solución, en dos colores, le permite observar la placa bacteriana en sus tres dimensiones, facilitando la evaluación de su espesura y su tiempo de existencia. Las placas más antiguas y densas son coloreadas en azul y las placas más recientes y delgadas aparecen coloreadas en rojo.

4 - Utilizándose Replak Solución 2 colores, el paciente puede por sí propio juzgar la eficiencia de su control de las placas según su coloración azul o roja (placa vieja o nueva) y también el dentista puede obtener una evaluación cuantitativa del control de placas de su paciente.

MODO DE EMPLEO

- 1 - Aplicar Replak con una bolita de algodón en todas las superficies de los dientes.
- 2 - Solicitar al paciente que enjague la boca hasta que el agua salga sin ningún color. Todas las superficies dentales donde haya placa bacteriana vieja serán coloreadas en azul y las placas recientes en rojo.
- 3 - Enseñar al paciente la perfecta técnica de cepillar los dientes para la eliminación de las placas.
- 4 - Posteriormente, aplicar una vez más Replak con la finalidad de asegurar la supresión total de las placas. Si el cepillado fuera suficiente, ninguna parte de la superficie dental aparecerá coloreada.

COMPOSICIÓN:

Colorante Azul, Colorante Rojo, Sacarina Sódica, Glicerina, Álcool Etilico, Nipagin, Nipazol, Aromatizante Artificial, Polisorbato 80 e Água Destilada.

PLAZO DE VALIDEZ: 3 años

PRESENTACIÓN:

Avio conteniendo frasco con 10ml.

ARMAZENAMIENTO:

Mantener en temperatura ambiente y al abrigo de la luz solar directa.

USO PROFESIONAL

DENTSPLY Indústria e Comércio Ltda. - Rua Alice Hervé, 86 - CEP 25665-010

Petrópolis - RJ - CNPJ 31.116.239/0001-55 - www.dentsply.com.br

Central de Relacionamento: 0800 721 1200 - Registro ANVISA nº 10186370174

Resp. Técnico: Marcelle Cortezia - CRF-RJ Nº 7999 - Indústria Brasileira

Importado y Distribuido en Latino América por:

DENTSPLY Argentina S.A.C.I. Gral. Enrique Martínez 657/661

CP 1426BBI Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dirección Técnica: Nora Canoura - Autorizado por A.N.M.A.T. - PM Nº 1093-20

Dentsply Chile Comercial Ltda. - Miguel Claro 285 - Providencia - Santiago - Chile

Dentsply Finance Co. - Carrera 19B Nº 84-47 - Bogotá, D.C. - Colombia



"ECONOMIZE ENERGIA
RECYCLAR MATERIAIS
E PRESERVAR
O MEIO AMBIENTE."



Replak Solução (2 Cores) Solução Evidenciadora de Placa Bacteriana

Replak é uma solução evidenciadora à base de dois indicadores cromáticos em proporção adequadamente balanceada a fim de que não haja interferência entre ambos.

VANTAGENS

Replak Solução oferece as seguintes vantagens:

- 1 - Além de colorir a placa de modo a contrastar com os tecidos e os dentes, torna a placa visível em zonas de difícil visualização; como espaços proximais e zona cervical.
- 2 - Possui a propriedade de selecionar diferentes tonalidades entre as áreas de placa espessa e antiga e as de placa recente e fina.

NOTA: Conforme bem documentada literatura dental, os depósitos de placa densa e antiga estão geralmente associados com doenças periodontais e exibem uma flora anaeróbica evidenciada na bolsa periodontal. Em outras palavras, a placa velha e espessa é provavelmente mais patogénica que a placa recente e delgada.

3 - Replak Solução em 2 cores permite observar a placa bacteriana em suas três dimensões, permitindo facilmente uma avaliação de sua espessura e do seu tempo de existência. As placas mais antigas e densas se colorem de azul, as placas mais recentes e delgadas se colorem de vermelho.

4 - Utilizando-se Replak Solução 2 cores, o paciente pode por si só julgar a eficiência de seu controle de placa pela coloração em azul ou vermelho (placa velha ou nova) e o dentista pode também obter uma avaliação quantitativa do controle de placa do seu paciente.

TÉCNICA DE EMPREGO

- 1 - Aplicar Replak com uma bolinha de algodão em todas as superfícies dos dentes.
- 2 - Solicitar ao paciente que enxague a boca até a água não sair tingida. Todas as superfícies dentárias onde houver placa bacteriana antiga ficarão tingidas de azul e onde houver placa recente, de vermelho.
- 3 - Instruir o paciente quanto à perfeita técnica de escovação, para eliminação da placa.
- 4 - Aplicar novamente Replak; se a escovação tiver sido perfeita, não haverá nenhuma superfície dentária colorida.

COMPOSIÇÃO: Corante Azul, Corante Vermelho, Sacarina Sódica, Glicerina, Álcool Etilico, Nipagin, Nipazol, Aromatizante Artificial, Polissorbato 80 e Água Destilada.

PRAZO DE VALIDADE: 3 anos

APRESENTAÇÃO:

Embalagem contendo frasco com 10ml.

ARMAZENAMENTO:

Mantener em temperatura ambiente e ao abrigo de luz solar direta.

USO PROFISIONAL

DENTSPLY Indústria e Comércio Ltda. - Rua Alice Hervé, 86 - CEP 25665-010

Petrópolis - RJ - CNPJ 31.116.239/0001-55 - www.dentsply.com.br

Central de Relacionamento: 0800 721 1200 - Registro ANVISA nº 10186370174

Resp. Técnico: Marcelle Cortezia - CRF-RJ Nº 7999 - Indústria Brasileira

Importado y Distribuido en Latino América por:

DENTSPLY Argentina S.A.C.I. Gral. Enrique Martínez 657/661

CP 1426BBI Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dirección Técnica: Nora Canoura - Autorizado por A.N.M.A.T. - PM Nº 1093-20

Dentsply Chile Comercial Ltda. - Miguel Claro 285 - Providencia - Santiago - Chile

Dentsply Finance Co. - Carrera 19B Nº 84-47 - Bogotá, D.C. - Colombia



"ECONOMIZE ENERGIA
RECYCLAR MATERIAIS
E PRESERVAR
O MEIO AMBIENTE."