

# Silano

Agente de ligação  
Agente de adesão/sinalização  
Agente de señalización

## Instruções de Uso

### Apresentação

Kit contendo: 01 frasco de Silano Primer com 3 mL ou 5 mL e 01 frasco de Silano Ativador com 3 mL ou 5 mL.

### Composição

Silano Primer - Álcool Etílico 95% e Silano A 174.  
Silano Ativador - Álcool Etílico 95% e Ácido Acético Glacial.

### Indicações de Uso

O Silano Agente de Ligação destina-se a formar uma camada quimicamente compatível entre porcelanas e cimentos resinosos ou agentes de união para resinas compostas.

### Contraindicações

Não há contraindicações.

### Advertências e Precauções

Contém etanol, que é inflamável.  
Somente para uso odontológico.

### Efeitos Adversos

Não há efeitos adversos.

### Instruções Passo a Passo

1. Dispense uma gota de Silano Primer e de Silano Ativador no interior de um pote dappen limpo. Quantidades adicionais de Primer e Ativador podem ser empregados, desde que mantida a proporção de 1:1.
2. Usando um pincel descartável, misture os componentes no interior do pote dappen, por 10-15 segundos.
3. Deixe a mistura Primer/Ativador descansar por 5 minutos, porém não mais que 10 minutos, antes de aplicar sobre a superfície da porcelana.
4. Havendo uma excessiva evaporação da mistura Primer/Ativador, misture nova quantidade como descrito anteriormente.
5. Aplique uma camada fina da mistura Silano Primer/Ativador sobre a superfície da porcelana preparada. Seque cuidadosamente com ar isento de umidade ou óleo. Aplique uma segunda camada de pequena espessura e seque com ar.

NOTA: Evite aplicar o Silano Agente de Ligação ativado sobre a face externa das facetas veneer de porcelana. O contato com a superfície externa causará adesão do cimento resinoso à face externa dificultando a limpeza ou permitindo a remoção de áreas glazeadas da restauração durante a eliminação dos excessos de cimento resinoso. O isolamento da face externa da veneer de porcelana com cera é um procedimento altamente recomendado antes da aplicação do Silano Agente de Ligação.

CUIDADO: INFLAMÁVEL: Contém etanol.

### Cuidados de Conservação

Conservar a 24°C ou abaixo.

Nº do Lote: Vide Rótulo.

Prazo de Validade: 18 meses.

O fabricante recomenda uso único.

Uso Profissional.

### DENTSPLY Indústria e comércio Ltda.

Rua José Francisco de Souza, 1926 - Distrito Industrial,  
Pirassununga - SP - Cep: 13633-412 - CNPJ: 31.116.239/0001-55  
Inscrição Estadual: 536.087.129.119 - www.dentsply.com.br  
Central de Relacionamento: 0800 771 2226 (Somente no Brasil)  
Cadastro ANVISA: 10186370046 - Responsável Técnico:  
Luiz Carlos Crepaldi - CRQ-SP: 04208396 - Indústria Brasileira

Importado y Distribuido por:

DENTSPLY Argentina S.A.C.I. - Gral. Enrique Martínez 657/661  
CP 1426BBI - C.A.B.A. Dirección Técnica: Nora Canoura MN Nº 2800  
Autorizado por A.N.M.A.T. - PM Nº 1093-27  
Dentsply Chile Comercial Ltda. Valenzuela Castillo 1063 Providencia Santiago - Chile  
Dentsply Finance Co. - Cra 19B N 84-47 - Bogotá - Colombia

# Silano

Agente de ligação  
Agente de adesão/sinalização  
Agente de señalización

## Instruções de Uso

### Presentación

Kit: 01 Frasco de Silano Primer con 3mL o 5mL y 01 frasco de Silano Activador con 3mL o 5mL.

### Composição

Silano Primer - Alcohol Etílico 95% y Silano A 174.  
Silano Ativador - Alcohol Etílico 95% y Ácido Acético Glacial.

### Indicações de Uso

Silano Agente de unión se utiliza para formar una capa químicamente compatible entre las porcelanas y los cementos resinosos o agentes de unión para resinas compuestas.

### Contraindicações

No hay contraindicaciones.

### Precauciones y Advertencias

Contiene etanol, que es inflamable.  
Sólo para uso odontológico.

### Efeitos Adversos

No hay efectos adversos.

### Instrucciones de Uso

1. Colocar una gota de Silano Primer y de Silano Activador en el interior de un vaso dappen limpo. Se pueden utilizar cantidades adicionales de Primer y de Activador, mientras que sea mantenida la proporción de 1:1.
  2. Utilizando un pincel descartable, mezclar los componentes en el interior del vaso dappen, durante 10-15 segundos.
  3. Dejar descansar la mezcla Primer/Activador durante 5 minutos (no exceder los 10 minutos), antes de aplicar sobre la superficie de la porcelana.
  4. Si se produjera una excesiva evaporación de la mezcla Primer/Activador, mezclar nuevamente cantidades se ha descrito anteriormente.
  5. Aplicar una capa fina de la mezcla Silano Primer/Activador sobre la superficie de la porcelana preparada. Secar cuidadosamente con aire exento de humedad o aceite. Aplicar una segunda capa de pequeño espesor y secar con aire.
- NOTA: Evitar la aplicación de Silano Agente de Unión activado sobre la superficie externa de las caras venner de porcelana. El contacto con la superficie externa causará adhesión del cemento resinoso a la cara externa dificultando la limpieza permitiendo la remoción de las áreas glaseadas de la restauración durante la eliminación de los excesos de cemento resinoso. El aislamiento de la cara externa del veneer de porcelana con cera es un procedimiento altamente recomendado antes de la aplicación de Silano Agente de Unión.
- CUIDADO: INFLAMABLE: Contiene etanol.

### Condiciones de Conservación

Conservar a temperaturas no mayores de 24°C.

Nº de lote: Véase la etiqueta.  
Plazo de Validez: 18 meses.  
El fabricante recomienda el uso único.  
Uso Profesional.

### DENTSPLY Indústria e comércio Ltda.

Rua José Francisco de Souza, 1926 - Distrito Industrial,  
Pirassununga - SP - Cep: 13633-412 - CNPJ: 31.116.239/0001-55  
Inscrição Estadual: 536.087.129.119 - www.dentsply.com.br  
Central de Relacionamento: 0800 771 2226 (Somente no Brasil)  
Cadastro ANVISA: 10186370046 - Responsável Técnico:  
Luiz Carlos Crepaldi - CRQ-SP: 04208396 - Indústria Brasileira

Importado y Distribuido por:  
DENTSPLY Argentina S.A.C.I. - Gral. Enrique Martínez 657/661  
CP 1426BBI - C.A.B.A. Dirección Técnica: Nora Canoura MN Nº 2800  
Autorizado por A.N.M.A.T. - PM Nº 1093-27  
Dentsply Chile Comercial Ltda. Valenzuela Castillo 1063 Providencia Santiago - Chile  
Dentsply Finance Co. - Cra 19B N 84-47 - Bogotá - Colombia