

Apresentação

As limas K-File® são fornecidas em blisters plásticos com 6 unidades de limas de aço inoxidável, estéreis.

K-File®

- V04 0363 021 006: 6 unidades de limas tamanho ISO 06 de 21mm;
- V04 0363 021 008: 6 unidades de limas tamanho ISO 08 de 21mm;
- V04 0363 021 010: 6 unidades de limas tamanho ISO 10 de 21mm;
- V04 0363 021 210: 6 unidades de limas tamanhos ISO 06-10 de 21mm;
- V04 0363 021 012: 6 unidades de limas tamanho ISO 12.5 de 21mm;
- V04 0363 021 015: 6 unidades de limas tamanho ISO 15 de 21mm;
- V04 0363 021 017: 6 unidades de limas tamanho ISO 17.5 de 21mm;
- V04 0363 021 020: 6 unidades de limas tamanho ISO 20 de 21mm;
- V04 0363 021 025: 6 unidades de limas tamanho ISO 25 de 21mm;
- V04 0363 021 030: 6 unidades de limas tamanho ISO 30 de 21mm;
- V04 0363 021 035: 6 unidades de limas tamanho ISO 35 de 21mm;
- V04 0363 021 040: 6 unidades de limas tamanho ISO 40 de 21mm;
- V04 0363 021 230: 6 unidades de limas tamanhos ISO 15-40 de 21mm;
- V04 0363 021 045: 6 unidades de limas tamanho ISO 45 de 21mm;
- V04 0363 021 050: 6 unidades de limas tamanho ISO 50 de 21mm;
- V04 0363 021 055: 6 unidades de limas tamanho ISO 55 de 21mm;
- V04 0363 021 060: 6 unidades de limas tamanho ISO 60 de 21mm;
- V04 0363 021 070: 6 unidades de limas tamanho ISO 70 de 21mm;
- V04 0363 021 080: 6 unidades de limas tamanho ISO 80 de 21mm;
- V04 0363 021 240: 6 unidades de limas tamanhos ISO 45-80 de 21mm;
- V04 0363 021 090: 6 unidades de limas tamanho ISO 90 de 21mm;
- V04 0363 021 100: 6 unidades de limas tamanho ISO 100 de 21mm;
- V04 0363 021 110: 6 unidades de limas tamanho ISO 110 de 21mm;
- V04 0363 021 250: 6 unidades de limas tamanhos ISO 90-110 de 21mm;
- V04 0363 025 006: 6 unidades de limas tamanho ISO 06 de 25mm;
- V04 0363 025 008: 6 unidades de limas tamanho ISO 08 de 25mm;
- V04 0363 025 010: 6 unidades de limas tamanho ISO 10 de 25mm;
- V04 0363 025 210: 6 unidades de limas tamanhos ISO 06-10 de 25mm;
- V04 0363 025 012: 6 unidades de limas tamanho ISO 12.5 de 25mm;
- V04 0363 025 015: 6 unidades de limas tamanho ISO 15 de 25mm;
- V04 0363 025 017: 6 unidades de limas tamanho ISO 17.5 de 25mm;
- V04 0363 025 020: 6 unidades de limas tamanho ISO 20 de 25mm;
- V04 0363 025 025: 6 unidades de limas tamanho ISO 25 de 25mm;
- V04 0363 025 030: 6 unidades de limas tamanho ISO 30 de 25mm;
- V04 0363 025 035: 6 unidades de limas tamanho ISO 35 de 25mm;
- V04 0363 025 040: 6 unidades de limas tamanho ISO 40 de 25mm;
- V04 0363 025 230: 6 unidades de limas tamanhos ISO 15-40 de 25mm;
- V04 0363 025 045: 6 unidades de limas tamanho ISO 45 de 25mm;
- V04 0363 025 050: 6 unidades de limas tamanho ISO 50 de 25mm;
- V04 0363 025 055: 6 unidades de limas tamanho ISO 55 de 25mm;
- V04 0363 025 060: 6 unidades de limas tamanho ISO 60 de 25mm;
- V04 0363 025 070: 6 unidades de limas tamanho ISO 70 de 25mm;
- V04 0363 025 080: 6 unidades de limas tamanho ISO 80 de 25mm;
- V04 0363 025 240: 6 unidades de limas tamanhos ISO 45-80 de 25mm;
- V04 0363 025 090: 6 unidades de limas tamanho ISO 90 de 25mm;
- V04 0363 025 100: 6 unidades de limas tamanho ISO 100 de 25mm;
- V04 0363 025 110: 6 unidades de limas tamanho ISO 110 de 25mm;
- V04 0363 025 120: 6 unidades de limas tamanho ISO 120 de 25mm;
- V04 0363 025 130: 6 unidades de limas tamanho ISO 130 de 25mm;
- V04 0363 025 140: 6 unidades de limas tamanho ISO 140 de 25mm;
- V04 0363 025 260: 6 unidades de limas tamanhos ISO 90-140 de 25mm;
- V04 0363 031 006: 6 unidades de limas tamanho ISO 06 de 31mm;
- V04 0363 031 008: 6 unidades de limas tamanho ISO 08 de 31mm;
- V04 0363 031 010: 6 unidades de limas tamanho ISO 10 de 31mm;
- V04 0363 031 210: 6 unidades de limas tamanhos ISO 06-10 de 31mm;

VDW GmbH

Bayerwaldstr. 15, D-81737, Munique
Alemanha

Registrado por:

DENTSPLY Indústria e Comércio Ltda.
Rua José Francisco de Souza, 1926 - CEP 13633412 - Pirassununga-SP
CNPJ 31.116.239/0001-55 - Indústria Brasileira
www.dentsply.com.br - SAC: 0800 771 2226 (Somente no Brasil)
Responsável Técnico: Luiz Carlos Crepaldi - CRQ-SP: 04208396
Registros ANVISA nº 80196880340

- V04 0363 031 015: 6 unidades de limas tamanho ISO 15 de 31mm;
- V04 0363 031 020: 6 unidades de limas tamanho ISO 20 de 31mm;
- V04 0363 031 025: 6 unidades de limas tamanho ISO 25 de 31mm;
- V04 0363 031 030: 6 unidades de limas tamanho ISO 30 de 31mm;
- V04 0363 031 035: 6 unidades de limas tamanho ISO 35 de 31mm;
- V04 0363 031 040: 6 unidades de limas tamanho ISO 40 de 31mm;
- V04 0363 031 230: 6 unidades de limas tamanhos ISO 15-40 de 31mm;
- V04 0363 031 045: 6 unidades de limas tamanho ISO 45 de 31mm;
- V04 0363 031 050: 6 unidades de limas tamanho ISO 50 de 31mm;
- V04 0363 031 055: 6 unidades de limas tamanho ISO 55 de 31mm;
- V04 0363 031 060: 6 unidades de limas tamanho ISO 60 de 31mm;
- V04 0363 031 070: 6 unidades de limas tamanho ISO 70 de 31mm;
- V04 0363 031 080: 6 unidades de limas tamanho ISO 80 de 31mm;
- V04 0363 031 240: 6 unidades de limas tamanhos ISO 45-80 de 31mm;
- V04 0363 031 090: 6 unidades de limas tamanho ISO 90 de 31mm;
- V04 0363 031 100: 6 unidades de limas tamanho ISO 100 de 31mm;
- V04 0363 031 110: 6 unidades de limas tamanho ISO 110 de 31mm;
- V04 0363 031 120: 6 unidades de limas tamanho ISO 120 de 31mm;
- V04 0363 031 130: 6 unidades de limas tamanho ISO 130 de 31mm;
- V04 0363 031 140: 6 unidades de limas tamanho ISO 140 de 31mm;
- V04 0363 031 260: 6 unidades de limas tamanhos ISO 90-140 de 31mm.

Composição

A lima K-File® foi projetada com uma parte ativa de aço inoxidável DIN 1.4310, um stop de silicone (como suporte visual para manter o comprimento de trabalho) e um cabo feito de polieterimida na parte superior do instrumento.

Indicações de Uso

A lima K-File® é indicada para utilização em tratamentos endodônticos convencionais de canais radiculares. É utilizada para moldar e suavizar o canal radicular em movimento de limagem (máximo 45° no sentido horário) com uma boa capacidade de corte. Devido ao ângulo de corte de 40° e uso em movimento de limagem, estas limas são bem eficientes em canais radiculares curvados. Este instrumento deve ser utilizado apenas por dentistas treinados.

Contraindicações

Não aplicável.

Advertências

As limas são instrumentos exclusivos de uso odontológico e não devem ser utilizadas para outros fins.

Precauções

As limas são fornecidas estéreis, mas podem ser reutilizadas (no máximo 8 vezes), devendo-se garantir que apenas procedimentos validados e equipamentos calibrados e submetidos regularmente à manutenção sejam utilizados na limpeza/desinfecção e esterilização das limas, a cada uso. Os procedimentos de limpeza e desinfecção são pré-requisitos essenciais para uma efetiva esterilização.

Efeitos Adversos

Não se aplica.

Instruções Passo a Passo

A lima K-File® é utilizada para preparar um canal radicular para preenchimento. A lima deve limpar o canal radicular e colocá-lo em um formato cônico, o que permite um preenchimento estreito do canal radicular. A seção transversal produzida durante a moagem tem a forma de um quadrado. Portanto, é possível preparar o canal radicular com um movimento de lâmina rotativa.

Cuidados de Conservação

A lima K-File® deve ser armazenada em temperatura entre 0°-30°C, umidade relativa entre 50-60% e ao abrigo de radiação solar.

Lote: Vide Rótulo do Produto

Prazo de Validade: 05 anos

VDW GmbH

Bayerwaldstr. 15, D-81737, Munique
Alemanha

Registrado por:

DENTSPLY Indústria e Comércio Ltda.
Rua José Francisco de Souza, 1926 - CEP 13633412 - Pirassununga-SP
CNPJ 31.116.239/0001-55 - Indústria Brasileira
www.dentsply.com.br - SAC: 0800 771 2226 (Somente no Brasil)
Responsável Técnico: Luiz Carlos Crepaldi - CRQ-SP: 04208396
Registros ANVISA nº 80196880340